

Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados

Nome Comercial: Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport

Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como a relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

O **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** tem como indicação a fixação em ossos fraturados com o objetivo de proporcionar fixação dos ossos do membro superior e inferior. São compostos por placas e parafusos. As placas possuem orifícios para introdução dos parafusos. Este sistema admite simultaneamente parafusos de pequenos e mini fragmentos conforme previsto no item 1.5, d6 da instrução normativa no- 1, de 2 de março de 2009.

A matéria-prima utilizada na fabricação dos modelos comerciais que compõe este sistema, estão especificados nas tabelas 1 e 2.



O acabamento superficial do produto médico é obtido através do processo de lixamento e polimento mecânico.


O tratamento superficial empregado é obtido através do processo de eletrocoloração.


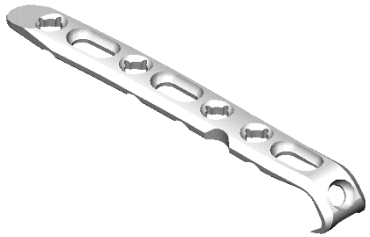
O **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** apresentam-se nos modelos e dimensões descritos abaixo, que permitem ao profissional escolher o modelo mais adequado a cada situação.


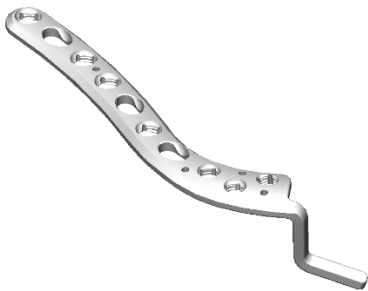
TABELA DE CÓDIGOS E DESCRIÇÕES


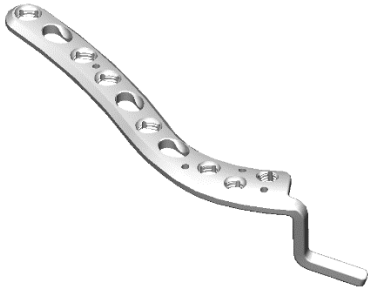

Tabela 1: Relação de Modelos Comerciais – Placas que compõe o **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport**



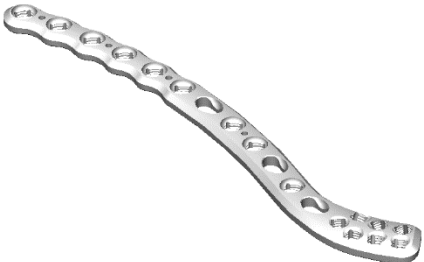
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA-PRIMA	ESPESSURA (MM)	ILUSTRAÇÃO
TI019.1084.103	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 03 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.1084.203	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 03 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.1114.106	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 06 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.1114.206	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 06 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2106.105	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 05 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2106.205	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 05 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2120.111	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV 11 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2126.107	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 07 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2126.207	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 07 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2146.109	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 09 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2146.209	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 09 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2166.111	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 11 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2166.211	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 11 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2186.113	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 13 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2186.213	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 13 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2206.115	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 15 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2206.215	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 15 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2226.117	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 17 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2226.217	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 17 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2246.119	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 19 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2246.219	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 19 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	


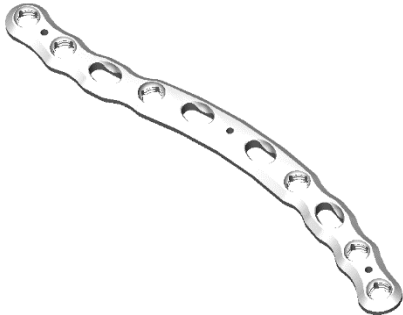
TI019.2266.121	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 21 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2266.221	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 21 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2286.123	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 23 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2286.223	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 23 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2306.125	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D 25 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,5	
TI019.2306.225	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV E 25 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,5	
TI019.3000.006	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR DISTAL BLOQUEADA AV 06 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.3000.007	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR DISTAL BLOQUEADA AV 07 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	

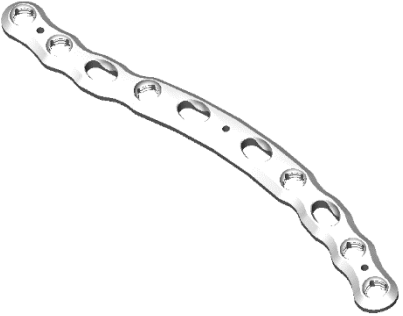
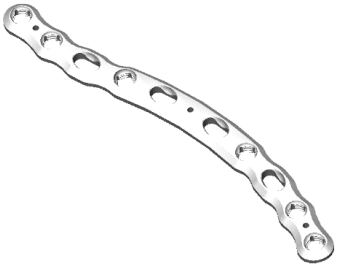
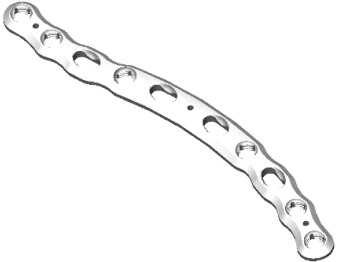
TI019.3000.008	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR DISTAL BLOQUEADA AV 08 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.4000.006	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV 06 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.4000.007	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV 07 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.4000.008	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV 08 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.4000.010	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV 10 F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI020.4242.104	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV COM GANCHO 04 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 67	2,5	
TI020.4242.204	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV COM GANCHO 04 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 67	2,5	
TI020.4262.106	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV COM GANCHO 06 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 67	2,5	
TI020.4262.206	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV COM GANCHO 06 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 67	2,5	
TI020.4282.108	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV COM GANCHO 08 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 67	2,5	
TI020.4282.208	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV COM GANCHO 08 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 67	2,5	
TI020.4202.110	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV COM GANCHO 10 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 67	2,5	
TI020.4202.210	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV COM GANCHO 10 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 67	2,5	

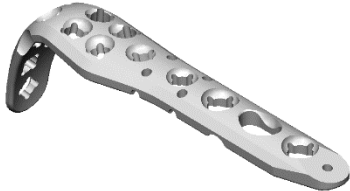
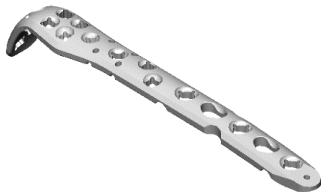
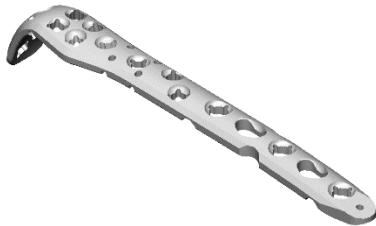
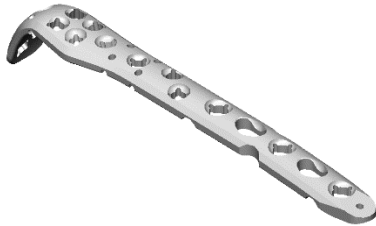
TI019.5012.104	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM 04 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5012.204	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM 04 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5016.104	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 16MM 04 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5016.204	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 16MM 04 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5020.104	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 20MM 04 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5020.204	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 20MM 04 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5012.105	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM 05 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5012.205	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM 05 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5016.105	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 16MM 05 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5016.205	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 16MM 05 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5020.105	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 20MM 05 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5020.205	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 20MM 05 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5012.106	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM 06 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5012.206	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM 06 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5016.106	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 16MM 06 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	

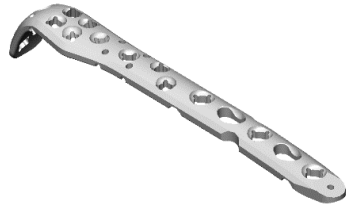
TI019.5016.206	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 16MM 06 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5020.106	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 20MM 06 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5020.206	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 20MM 06 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5012.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5012.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5016.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 16MM 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5016.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 16MM 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5020.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 20MM 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5020.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 20MM 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.5112.104	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM 04 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5112.204	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM 04 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5116.104	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 16MM 04 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5116.204	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 16MM 04 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5120.104	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 20MM 04 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5120.204	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 20MM 04 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5112.105	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM 05 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5112.205	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM 05 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5116.105	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 16MM 05 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5116.205	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 16MM 05 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5120.105	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 20MM 05 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5120.205	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 20MM 05 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	

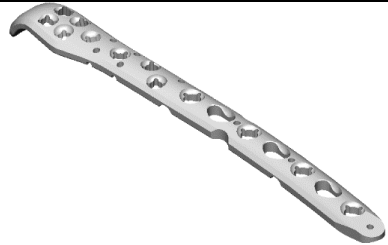




TI019.5112.106	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM 06 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5112.206	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM 06 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5116.106	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 16MM 06 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5116.206	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 16MM 06 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5120.106	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 20MM 06 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5120.206	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 20MM 06 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5112.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5112.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5116.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 16MM 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5116.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 16MM 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5120.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 20MM 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.5120.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 20MM 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6000.103	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 03 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.203	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 03 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.104	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 04 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.204	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 04 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.105	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 05 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.205	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 05 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.108	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 08 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.208	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 08 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.112	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 12 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.6000.212	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV 12 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	



TI019.6100.103	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 03 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.203	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 03 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.104	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 04 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.204	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 04 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.105	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 05 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.205	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 05 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.108	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 08 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.208	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 08 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.112	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 12 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.6100.212	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL BLOQUEADA AV LP 12 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.7000.106	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD 06 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.7000.206	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD 06 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.7000.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.7000.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.7000.108	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD 08 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.7000.208	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD 08 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.7000.110	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD 10 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.7000.210	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD 10 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.7100.106	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP 06 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.7100.206	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP 06 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.7100.107	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP 07 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	



TI019.7100.207	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP 07 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.7100.108	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP 08 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.7100.208	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP 08 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.7100.110	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP 10 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.7100.210	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP 10 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.8000.108	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV 08 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.8000.208	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV 08 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.8000.110	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV 10 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.8000.210	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV 10 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	3,0	
TI019.8100.108	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV LP 08 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.8100.208	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV LP 08 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.8100.110	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV LP 10 F D	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	
TI019.8100.210	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV LP 10 F E	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	2,5	


TI020.1073.103	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV 03 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.1073.203	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV 03 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2070.101	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 01 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2070.201	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 01 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2090.103	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 03 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2090.203	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 03 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2110.105	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 05 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2110.205	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 05 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	

TI020.2130.107	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 07 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2130.207	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 07 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2150.109	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 09 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2150.209	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 09 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2170.111	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 11 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2170.211	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 11 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2190.113	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 13 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.2190.213	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV 13 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.3128.107	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA- ARTICULAR 06 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	






TI020.3128.207	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 06 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020. 3148.109	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 08 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.3148.209	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 08 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.3168.111	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 10 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.3168.211	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 10 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.3188.113	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 12 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.3188.213	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 12 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.3208.115	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 15 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.3208.215	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR 15 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	

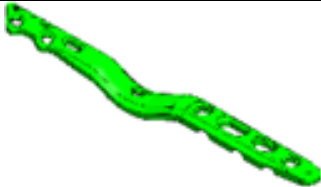

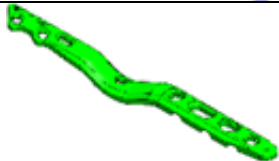

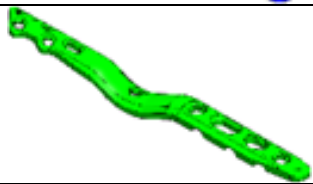

TI020.5081.103	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 03 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5081.203	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 03 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5091.104	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 04 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5091.204	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 04 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5101.105	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 05 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5101.205	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 05 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5121.107	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 07 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5121.207	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 07 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5122.111	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 11 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5141.109	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 09 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5141.209	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 09 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5161.111	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 11 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5161.211	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 11 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5181.113	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 13 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5181.213	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 13 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5201.115	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 15 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.5201.215	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL 15 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.6081.103	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 03 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.6081.203	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 03 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.6091.104	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 04 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.6091.204	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 04 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.6121.107	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 07 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.6121.207	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 07 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.6141.109	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 09 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	





TI020.6141.209	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 09 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.6161.111	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 11 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.6161.211	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 11 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.6181.113	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 13 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.6181.213	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 13 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.6201.115	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 15 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.6201.215	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE 15 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7072.101	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 01 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7072.201	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 01 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7082.102	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 02 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7082.202	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 02 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7112.105	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 05 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7112.205	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 05 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7132.107	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 07 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7132.207	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 07 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7152.109	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 09 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7152.209	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 09 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7172.111	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 11 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7172.211	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 11 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7192.113	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 13 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.7192.213	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL 13 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.8072.101	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 01 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.8072.201	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 01 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		
TI020.8082.102	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 02 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0		


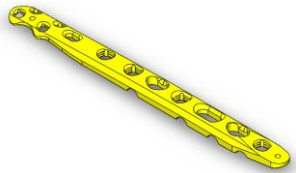
TI020.8082.202	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 02 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8092.103	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 03 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8092.203	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 03 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8112.105	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 05 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8112.205	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 05 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8122.111	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 11 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8132.107	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 07 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8132.207	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 07 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8152.109	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 09 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8152.209	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 09 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8172.111	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 11 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8172.211	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 11 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8192.113	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 13 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.8192.213	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL 13 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9075.101	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 01 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9075.201	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 01 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9085.102	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 02 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9085.202	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 02 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9095.103	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 03 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9095.203	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 03 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9115.105	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 05 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9115.205	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 05 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9135.107	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 07 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	

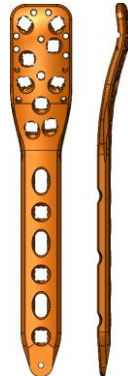
TI020.9135.207	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 07 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9155.109	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 09 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9155.209	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 09 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9175.111	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 11 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9175.211	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 11 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9195.113	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 13 F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.9195.213	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO 13 F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI020.4301.103	PLACA BLOQUEADA AV RADIO PROXIMAL P 3 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4301.105	PLACA BLOQUEADA AV RADIO PROXIMAL P 5 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4302.103	PLACA BLOQUEADA AV RADIO PROXIMAL S 3 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4302.105	PLACA BLOQUEADA AV RADIO PROXIMAL S 5 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

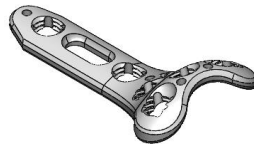
TI010.3105.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° P 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3110.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° M 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3205.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° P 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3210.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° M 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3305.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° P 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3310.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° M 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.4105.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 5° P 11F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.4110.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 5° M 11F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.4205.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 10° P 11F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.4210.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 10° M 11F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.4305.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 15° P 11F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.4310.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 15° M 11F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3105.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° P 10F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	

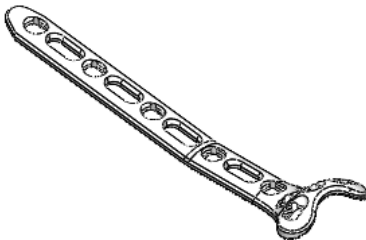
TI010.3105.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° P 10F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3110.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° M 10F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3110.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° M 10F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3205.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° P 10F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3205.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° P 10F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3210.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° M 10F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3210.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° M 10F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	

				
TI010.3305.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° P 10F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3305.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° P 10F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.3310.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° M 10F D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	

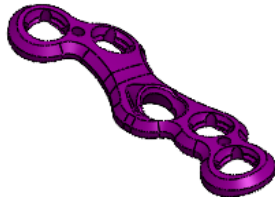
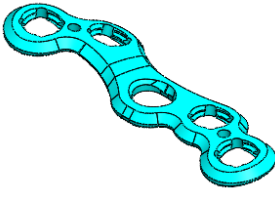
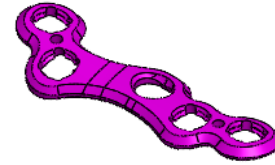
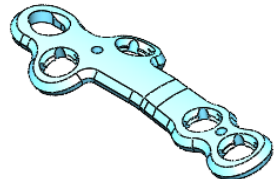
TI010.3310.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° M 10F E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.5102.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV RT 11F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.5112.012	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV RT 12F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	
TI010.5122.013	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV RT 13F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,0	

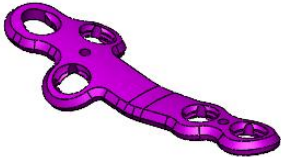
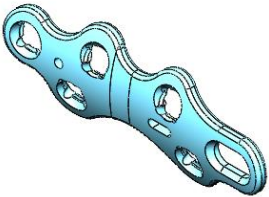

TI019.2090.003	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 3 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2100.004	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 4 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2110.005	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 5 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2120.006	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 6 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2130.007	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 7 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2140.008	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 8 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2150.009	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 9 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2160.010	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 10 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2170.011	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 11 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2180.012	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 12 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2190.013	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 13 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2200.014	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 14 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2210.015	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 15 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2220.016	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 16 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2230.017	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 17 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2240.018	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 18 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2250.019	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 19 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2260.020	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 20 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2270.021	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 21 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2280.022	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 22 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2290.023	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 23 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	
TI019.2300.024	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - 24 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	3,5	

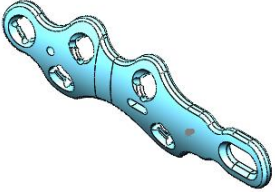

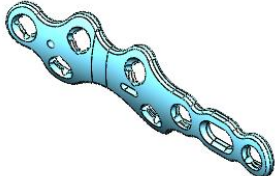
TI020.4420.002	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 2F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4420.003	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 3F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4420.004	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 4F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4420.005	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 5F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4420.006	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 6F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4420.007	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 7F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4420.008	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 8F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4420.009	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 9F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4420.010	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø20 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.002	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 2F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.003	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 3F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.004	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 4F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.005	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 5F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.006	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 6F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.007	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 7F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.008	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 8F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.009	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 9F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4422.010	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø22 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4424.002	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 2F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4424.003	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 3F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4424.004	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 4F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4424.005	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 5F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4424.006	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 6F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4424.007	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 7F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	


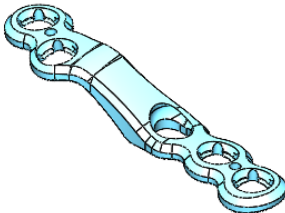

TI020.4424.008	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 8F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4424.009	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 9F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4424.010	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø24 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.002	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 2F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.003	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 3F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.004	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 4F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.005	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 5F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.006	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 6F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.007	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 7F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.008	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 8F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.009	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 9F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4426.010	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM Ø26 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4520.005	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø20 5F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4520.006	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø20 6F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4520.007	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø20 7F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4520.008	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø20 8F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4520.009	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø20 9F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4520.010	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø20 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4522.005	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø22 5F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4522.006	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø22 6F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4522.007	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø22 7F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4522.008	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø22 8F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4522.009	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø22 9F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4522.010	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø22 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

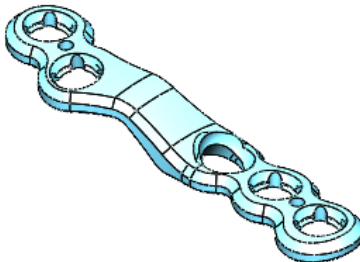

TI020.4524.005	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø24 5F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4524.006	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø24 6F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4524.007	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø24 7F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4524.008	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø24 8F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4524.009	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø24 9F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4524.010	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø24 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4526.005	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø26 5F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4526.006	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø26 6F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4526.007	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø26 7F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4526.008	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø26 8F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4526.009	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø26 9F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI020.4526.010	PLACA DE RÁDIO PROXIMAL VERSÁTIVUM ANGULADA Ø26 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0001.105	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0001.115	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0001.125	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

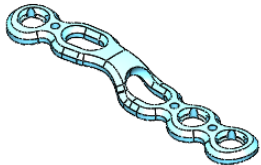

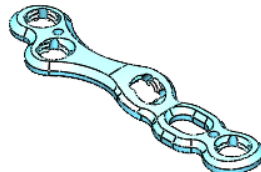


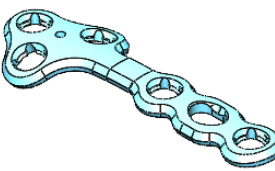
TI003.0001.205	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0001.215	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0001.225	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0002.105	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0002.115	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0002.125	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0002.205	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0002.215	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0002.225	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0003.105	PLACA EVOLVE-FOOT STD PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0003.115	PLACA EVOLVE-FOOT STD PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0003.125	PLACA EVOLVE-FOOT STD PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

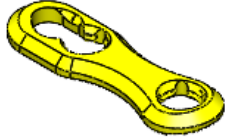
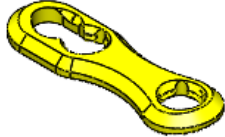
TI003.0003.205	PLACA EVOLVE-FOOT STD PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0003.215	PLACA EVOLVE-FOOT STD PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0003.225	PLACA EVOLVE-FOOT STD PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.106	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 06 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.116	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 06 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.126	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 06 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.206	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 06 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.216	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 06 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.226	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 06 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	


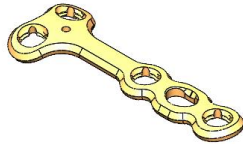

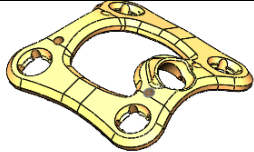

TI003.0004.107	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 07 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.117	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 07 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.127	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 07 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.207	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 07 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.217	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 07 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.227	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 07 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.108	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 08 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.118	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 08 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.128	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 08 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	


TI003.0004.208	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 08 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.218	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 08 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0004.228	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 08 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.104	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS SEM PASSO - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.114	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 1MM - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.124	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 2MM - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.134	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 3MM - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.144	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 4MM - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.154	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 5MM - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.164	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 6MM - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.204	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS SEM PASSO - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.214	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 1MM - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.224	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 2MM - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.234	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 3MM - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.244	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 4MM - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0010.254	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 5MM - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

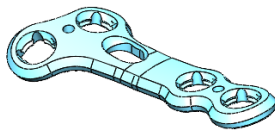

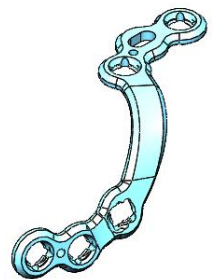
TI003.0010.264	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 6MM - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.105	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS SEM PASSO C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.115	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 1MM C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.125	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 2MM C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.135	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 3MM C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.145	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 4MM C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.155	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 5MM C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.165	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 6MM C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.205	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS SEM PASSO C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.215	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 1MM C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.225	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 2MM C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.235	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 3MM C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.245	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 4MM C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0011.255	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 5MM C - 05 FUROS	TITÂNIO LIGA -	1,6	

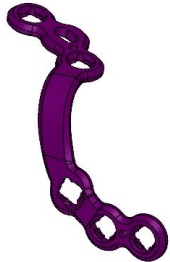
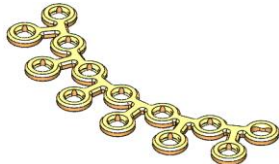
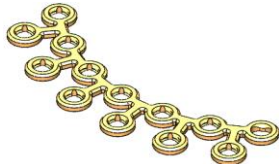
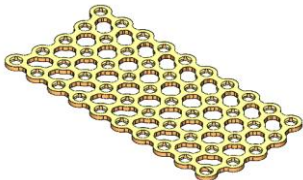

	E	ASTM F 136		
TI003.0011.265	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO 6MM C - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0013.105	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PLANTAR - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0013.205	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PLANTAR - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0020.105	PLACA EVOLVE-FOOT LISFRANC ANGULADA - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0020.205	PLACA EVOLVE-FOOT LISFRANC ANGULADA - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0021.005	PLACA EVOLVE-FOOT LISFRANC Y - 05 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0022.106	PLACA EVOLVE-FOOT LISFRANC TREVO - 06 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

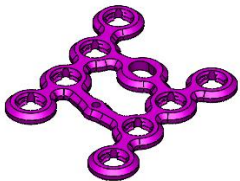
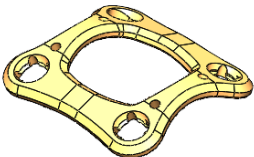
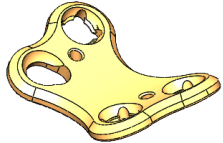
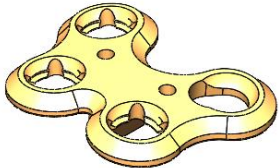
TI003.0032.020	PLACA EVOLVE-FOOT I - 02 FUROS 20MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0032.022	PLACA EVOLVE-FOOT I - 02 FUROS 22MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0032.024	PLACA EVOLVE-FOOT I - 02 FUROS 24MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0032.026	PLACA EVOLVE-FOOT I - 02 FUROS 26MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0032.028	PLACA EVOLVE-FOOT I - 02 FUROS 28MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0032.030	PLACA EVOLVE-FOOT I - 02 FUROS 30MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0032.032	PLACA EVOLVE-FOOT I - 02 FUROS 32MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0033.105	PLACA EVOLVE-FOOT L - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0033.106	PLACA EVOLVE-FOOT L - 06 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	


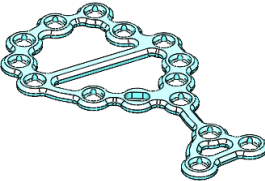
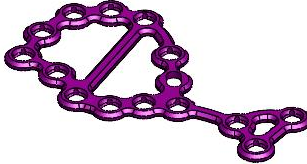
TI003.0033.205	PLACA EVOLVE-FOOT L - 05 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0033.206	PLACA EVOLVE-FOOT L - 06 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0034.005	PLACA EVOLVE-FOOT T - 05 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0034.015	PLACA EVOLVE-FOOT T - 05 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0034.025	PLACA EVOLVE-FOOT T - 05 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0034.006	PLACA EVOLVE-FOOT T - 06 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0034.016	PLACA EVOLVE-FOOT T - 06 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0034.026	PLACA EVOLVE-FOOT T - 06 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0035.100	PLACA EVOLVE-FOOT QUINTO METATARSO COM GANCHO D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0035.200	PLACA EVOLVE-FOOT QUINTO METATARSO COM GANCHO E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0051.001	PLACA EVOLVE-FOOT ARTRODESE TALO-NAVICULAR C - P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0051.002	PLACA EVOLVE-FOOT ARTRODESE TALO-NAVICULAR C - M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0051.003	PLACA EVOLVE-FOOT ARTRODESE TALO-NAVICULAR C - G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0105.002	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 2MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0105.003	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 3MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0105.004	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 4MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0105.005	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 5MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0105.006	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 6MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

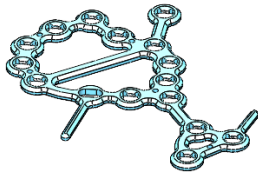
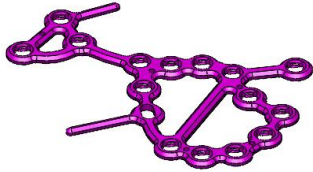
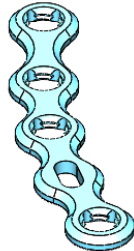
TI003.0105.007	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 7MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0105.008	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 8MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0105.009	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 9MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0105.010	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 10MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0031.000	PLACA EVOLVE-FOOT H - 04 FUROS PP	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0031.001	PLACA EVOLVE-FOOT H - 04 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0031.002	PLACA EVOLVE-FOOT H - 04 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0031.003	PLACA EVOLVE-FOOT H - 04 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0005.108	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP R - 08 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0005.208	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP R - 08 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0005.110	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP R - 10 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0005.210	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP R - 10 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

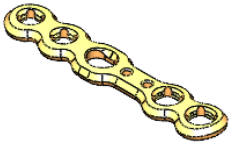
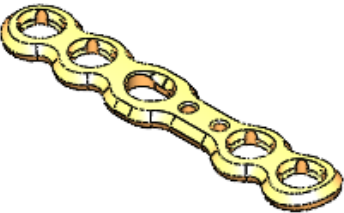
TI003.0000.104	PLACA EVOLVE-FOOT MINI PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0000.114	PLACA EVOLVE-FOOT MINI PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0000.124	PLACA EVOLVE-FOOT MINI PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 04 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0000.204	PLACA EVOLVE-FOOT MINI PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 0 GRAUS - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0000.214	PLACA EVOLVE-FOOT MINI PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 5 GRAUS - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0000.224	PLACA EVOLVE-FOOT MINI PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP 10 GRAUS - 04 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0012.106	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS MEDIO-PLANTAR - 06 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	


TI003.0012.206	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS MEDIO-PLANTAR - 06 FUROS E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0040.005	PLACA EVOLVE-FOOT REDE CURVA - 05 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0040.009	PLACA EVOLVE-FOOT REDE CURVA - 09 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0040.013	PLACA EVOLVE-FOOT REDE CURVA - 13 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0041.025	PLACA EVOLVE-FOOT REDE - 5X5 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0041.050	PLACA EVOLVE-FOOT REDE - 5X10 FUROS	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0042.100	PLACA EVOLVE-FOOT OBLÍQUA D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

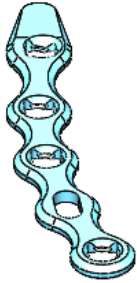

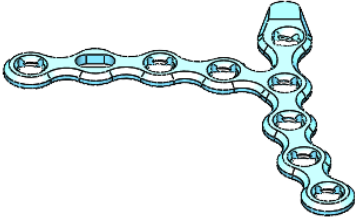
TI003.0042.200	PLACA EVOLVE-FOOT OBLÍQUA E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0050.001	PLACA EVOLVE-FOOT ARTRODESE TALO-NAVICULAR P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0050.002	PLACA EVOLVE-FOOT ARTRODESE TALO-NAVICULAR M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0050.003	PLACA EVOLVE-FOOT ARTRODESE TALO-NAVICULAR G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0052.020	PLACA EVOLVE-FOOT TALAR 20MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0052.022	PLACA EVOLVE-FOOT TALAR 22MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0052.024	PLACA EVOLVE-FOOT TALAR 24MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0060.002	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA PASSO 2MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0060.003	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA PASSO 3MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0060.004	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA PASSO 4MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0060.005	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA PASSO 5MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0060.006	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA PASSO 6MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

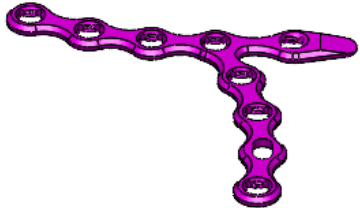
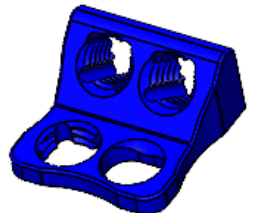
TI003.0060.100	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0060.200	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0060.300	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0100.100	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA P - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0100.101	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA M - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0100.102	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA G - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0100.200	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA P - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0100.201	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA M - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0100.202	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA G - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

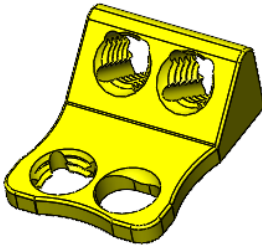
TI003.0101.100	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA COM SUPORTE P - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0101.101	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA COM SUPORTE M - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0101.102	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA COM SUPORTE G - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0101.200	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA COM SUPORTE P - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0101.201	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA COM SUPORTE M - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0101.202	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA COM SUPORTE G - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0102.100	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR P - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0102.101	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR M - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0102.102	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR G - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

TI003.0029.000	PLACA EVOLVE-FOOT ESPECIAL M3 – 05 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.002	PLACA EVOLVE-FOOT – 02 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.003	PLACA EVOLVE-FOOT – 03 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.004	PLACA EVOLVE-FOOT – 04 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.005	PLACA EVOLVE-FOOT – 05 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.006	PLACA EVOLVE-FOOT – 06 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.007	PLACA EVOLVE-FOOT – 07 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.008	PLACA EVOLVE-FOOT – 08 FUROS P	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.012	PLACA EVOLVE-FOOT – 02 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.013	PLACA EVOLVE-FOOT – 03 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.014	PLACA EVOLVE-FOOT – 04 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.015	PLACA EVOLVE-FOOT – 05 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.016	PLACA EVOLVE-FOOT – 06 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.017	PLACA EVOLVE-FOOT – 07 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.018	PLACA EVOLVE-FOOT – 08 FUROS M	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.022	PLACA EVOLVE-FOOT – 02 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.023	PLACA EVOLVE-FOOT – 03 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.024	PLACA EVOLVE-FOOT – 04 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.025	PLACA EVOLVE-FOOT – 05 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.026	PLACA EVOLVE-FOOT – 06 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0030.027	PLACA EVOLVE-FOOT – 07 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

TI003.0030.028	PLACA EVOLVE-FOOT – 08 FUROS G	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0102.200	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR P - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0102.201	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR M - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0102.202	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR G - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

TI003.0103.100	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR COM SUPORTE P - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0103.101	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR COM SUPORTE M - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0103.102	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR COM SUPORTE G - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0103.200	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR COM SUPORTE P - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0103.201	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR COM SUPORTE M - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0103.202	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR COM SUPORTE G - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0104.100	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR T COM SUPORTE P - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0104.101	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR T COM SUPORTE M - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0104.102	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR T COM SUPORTE G - D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

TI003.0104.200	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR T COM SUPORTE P - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0104.201	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR T COM SUPORTE M - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0104.202	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR T COM SUPORTE G - E	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.012	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 12MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.013	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 13MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.014	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 14MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.015	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 15MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.016	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 16MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.017	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 17MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.018	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 18MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.019	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 19MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.020	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 20MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.021	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 21MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.022	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO 12 X 22MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	

TI003.0212.023	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 23MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.024	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 24MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.025	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 25MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.026	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 26MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.027	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 27MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.028	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 28MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.029	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 29MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.030	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 30MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.031	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 31MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0212.032	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X 32MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.012	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 12MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.013	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 13MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.014	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 14MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.015	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 15MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.016	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 16MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.017	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 17MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.018	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 18MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.019	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 19MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.020	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 20MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.021	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 21MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.022	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 22MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.023	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 23MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.024	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 24MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.025	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 25MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	


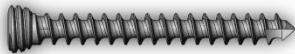

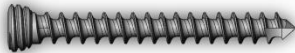
TI003.0215.026	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 26MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.027	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 27MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.028	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 28MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.029	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 29MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.030	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 30MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.031	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 31MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.0215.032	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X 32MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,6	
TI003.1000.002	PLACA BLOQUEADA AV MEDIA PARA FIXAÇÃO/FUSÃO DO PRIMEIRO METATARSO/FALANGE	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	1,5	

Tabela 2: Relação de Modelos Comerciais – Parafusos que compõe o **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA-PRIMA	ILUSTRAÇÃO
TI001.2027.012	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 12MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.2027.013	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 13MM		
TI001.2027.014	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 14MM		
TI001.2027.015	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 15MM		
TI001.2027.016	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 16MM		
TI001.2027.017	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 17MM		
TI001.2027.018	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 18MM		
TI001.2027.019	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 19MM		
TI001.2027.020	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 20MM		
TI001.2027.021	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 21MM		
TI001.2027.022	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 22MM		
TI001.2027.023	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 23MM		
TI001.2027.024	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 24MM		
TI001.2027.025	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 25MM		
TI001.2027.026	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 26MM		
TI001.2027.027	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 27MM		
TI001.2027.028	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 28MM		
TI001.2027.029	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 29MM		
TI001.2027.030	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 30MM		
TI001.2027.031	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 31MM		
TI001.2027.032	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 32MM		
TI001.2027.033	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 33MM		
TI001.2027.034	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 34MM		
TI001.2027.035	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 35MM		
TI001.2027.036	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 36MM		
TI001.2027.037	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 37MM		
TI001.2027.038	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 38MM		
TI001.2027.039	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 39MM		
TI001.2027.040	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 40MM		
TI001.2027.041	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 41MM		
TI001.2027.042	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 42MM		
TI001.2027.043	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 43MM		
TI001.2027.044	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 44MM		
TI001.2027.045	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 45MM		

TI001.2027.046	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 46MM				
TI001.2027.047	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 47MM				
TI001.2027.048	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 48MM				
TI001.2027.049	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 49MM				
TI001.2027.050	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 50MM				
TI001.2027.051	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 51MM				
TI001.2027.052	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 52MM				
TI001.2027.053	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 53MM				
TI001.2027.054	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 54MM				
TI001.2027.055	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 55MM				
TI001.2027.056	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 56MM				
TI001.2027.057	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 57MM				
TI001.2027.058	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 58MM				
TI001.2027.059	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 59MM				
TI001.2027.060	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 60MM				
TI001.2035.010	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 10MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.2035.011	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 11MM				
TI001.2035.012	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 12MM				
TI001.2035.013	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 13MM				
TI001.2035.014	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 14MM				
TI001.2035.015	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 15MM				
TI001.2035.016	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 16MM				
TI001.2035.017	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 17MM				
TI001.2035.018	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 18MM				
TI001.2035.019	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 19MM				
TI001.2035.020	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 20MM				
TI001.2035.021	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 21MM				
TI001.2035.022	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 22MM				
TI001.2035.023	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 23MM				
TI001.2035.024	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 24MM				
TI001.2035.025	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 25MM				
TI001.2035.026	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 26MM				
TI001.2035.027	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 27MM				
TI001.2035.028	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 28MM				


T1001.2035.029	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 29MM		
T1001.2035.030	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 30MM		
T1001.2035.031	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 31MM		
T1001.2035.032	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 32MM		
T1001.2035.033	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 33MM		
T1001.2035.034	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 34MM		
T1001.2035.035	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 35MM		
T1001.2035.036	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 36MM		
T1001.2035.037	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 37MM		
T1001.2035.038	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 38MM		
T1001.2035.039	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 39MM		
T1001.2035.040	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 40MM		
T1001.2035.041	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 41MM		
T1001.2035.042	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 42MM		
T1001.2035.043	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 43MM		
T1001.2035.044	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 44MM		
T1001.2035.045	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 45MM		
T1001.2035.046	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 46MM		
T1001.2035.047	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 47MM		
T1001.2035.048	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 48MM		
T1001.2035.049	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 49MM		
T1001.2035.050	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 50MM		
T1001.2035.051	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 51MM		
T1001.2035.052	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 52MM		
T1001.2035.053	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 53MM		
T1001.2035.054	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 54MM		
T1001.2035.055	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 55MM		
T1001.2035.056	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 56MM		
T1001.2035.057	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 57MM		
T1001.2035.058	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 58MM		
T1001.2035.059	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 59MM		
T1001.2035.060	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 60MM		
T1001.2035.061	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 61MM		
T1001.2035.062	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 62MM		

TI001.2035.063	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 63MM				
TI001.2035.064	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 64MM				
TI001.2035.065	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 65MM				
TI001.2035.066	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 66MM				
TI001.2035.067	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 67MM				
TI001.2035.068	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 68MM				
TI001.2035.069	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 69MM				
TI001.2035.070	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 70MM				
TI001.2035.071	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 71MM				
TI001.2035.072	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 72MM				
TI001.2035.073	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 73MM				
TI001.2035.074	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 74MM				
TI001.2035.075	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 75MM				
TI001.2035.076	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 76MM				
TI001.2035.077	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 77MM				
TI001.2035.078	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 78MM				
TI001.2035.079	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 79MM				
TI001.2035.080	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 80MM				
TI001.3027.010	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 10MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.3027.011	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 11MM				
TI001.3027.012	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 12MM				
TI001.3027.013	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 13MM				
TI001.3027.014	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 14MM				
TI001.3027.015	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 15MM				
TI001.3027.016	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 16MM				
TI001.3027.017	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 17MM				
TI001.3027.018	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 18MM				
TI001.3027.019	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 19MM				
TI001.3027.020	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 20MM				
TI001.3027.021	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 21MM				
TI001.3027.022	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 22MM				
TI001.3027.023	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 23MM				
TI001.3027.024	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 24MM				
TI001.3027.025	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 25MM				

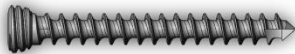
TI001.3027.026	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 26MM		
TI001.3027.027	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 27MM		
TI001.3027.028	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 28MM		
TI001.3027.029	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 29MM		
TI001.3027.030	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 30MM		
TI001.3027.031	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 31MM		
TI001.3027.032	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 32MM		
TI001.3027.033	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 33MM		
TI001.3027.034	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 34MM		
TI001.3027.035	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 35MM		
TI001.3027.036	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 36MM		
TI001.3027.037	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 37MM		
TI001.3027.038	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 38MM		
TI001.3027.039	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 39MM		
TI001.3027.040	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 40MM		
TI001.3027.041	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 41MM		
TI001.3027.042	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 42MM		
TI001.3027.043	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 43MM		
TI001.3027.044	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 44MM		
TI001.3027.045	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 45MM		
TI001.3027.046	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 46MM		
TI001.3027.047	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 47MM		
TI001.3027.048	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 48MM		
TI001.3027.049	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 49MM		
TI001.3027.050	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 50MM		
TI001.3027.051	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 51MM		
TI001.3027.052	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 52MM		
TI001.3027.053	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 53MM		
TI001.3027.054	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 54MM		
TI001.3027.055	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 55MM		
TI001.3027.056	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 56MM		
TI001.3027.057	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 57MM		
TI001.3027.058	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 58MM		
TI001.3027.059	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 59MM		

TI001.3027.060	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 60MM		
TI001.3027.061	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 61MM		
TI001.3027.062	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 62MM		
TI001.3027.063	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 63MM		
TI001.3027.064	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 64MM		
TI001.3027.065	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 65MM		
TI001.3027.066	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 66MM		
TI001.3027.067	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 67MM		
TI001.3027.068	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 68MM		
TI001.3027.069	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 69MM		
TI001.3027.070	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 70MM		
TI001.3027.071	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 71MM		
TI001.3027.072	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 72MM		
TI001.3027.073	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 73MM		
TI001.3027.074	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 74MM		
TI001.3027.075	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 75MM		
TI001.3027.076	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 76MM		
TI001.3027.077	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 77MM		
TI001.3027.078	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 78MM		
TI001.3027.079	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 79MM		
TI001.3027.080	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø2,7MM X 80MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI002.2027.012	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 12MM		
TI002.2027.013	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 13MM		
TI002.2027.014	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 14MM		
TI002.2027.015	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 15MM		
TI002.2027.016	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 16MM		
TI002.2027.017	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 17MM		
TI002.2027.018	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 18MM		
TI002.2027.019	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 19MM		
TI002.2027.020	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 20MM		
TI002.2027.021	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 21MM		
TI002.2027.022	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 22MM		
TI002.2027.023	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 23MM		
TI002.2027.024	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 24MM		


TI002.2027.025	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 25MM		
TI002.2027.026	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 26MM		
TI002.2027.027	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 27MM		
TI002.2027.028	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 28MM		
TI002.2027.029	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 29MM		
TI002.2027.030	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 30MM		
TI002.2027.031	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 31MM		
TI002.2027.032	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 32MM		
TI002.2027.033	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 33MM		
TI002.2027.034	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 34MM		
TI002.2027.035	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 35MM		
TI002.2027.036	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 36MM		
TI002.2027.037	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 37MM		
TI002.2027.038	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 38MM		
TI002.2027.039	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 39MM		
TI002.2027.040	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 40MM		
TI002.2027.041	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 41MM		
TI002.2027.042	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 42MM		
TI002.2027.043	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 43MM		
TI002.2027.044	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 44MM		
TI002.2027.045	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 45MM		
TI002.2027.046	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 46MM		
TI002.2027.047	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 47MM		
TI002.2027.048	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 48MM		
TI002.2027.049	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 49MM		
TI002.2027.050	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 50MM		
TI002.2027.051	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 51MM		
TI002.2027.052	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 52MM		
TI002.2027.053	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 53MM		
TI002.2027.054	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 54MM		
TI002.2027.055	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 55MM		
TI002.2027.056	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 56MM		
TI002.2027.057	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 57MM		
TI002.2027.058	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 58MM		

TI002.2027.059	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 59MM		
TI002.2027.060	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO Ø2,7MM X 60MM		
TI002.2035.010	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 10MM		
TI002.2035.011	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 11MM		
TI002.2035.012	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 12MM		
TI002.2035.013	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 13MM		
TI002.2035.014	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 14MM		
TI002.2035.015	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 15MM		
TI002.2035.016	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 16MM		
TI002.2035.017	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 17MM		
TI002.2035.018	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 18MM		
TI002.2035.019	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 19MM		
TI002.2035.020	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 20MM		
TI002.2035.021	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 21MM		
TI002.2035.022	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 22MM		
TI002.2035.023	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 23MM		
TI002.2035.024	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 24MM		
TI002.2035.025	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 25MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI002.2035.026	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 26MM		
TI002.2035.027	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 27MM		
TI002.2035.028	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 28MM		
TI002.2035.029	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 29MM		
TI002.2035.030	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 30MM		
TI002.2035.031	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 31MM		
TI002.2035.032	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 32MM		
TI002.2035.033	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 33MM		
TI002.2035.034	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 34MM		
TI002.2035.035	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 35MM		
TI002.2035.036	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 36MM		
TI002.2035.037	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 37MM		
TI002.2035.038	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 38MM		
TI002.2035.039	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 39MM		
TI002.2035.040	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 40MM		
TI002.2035.041	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 41MM		

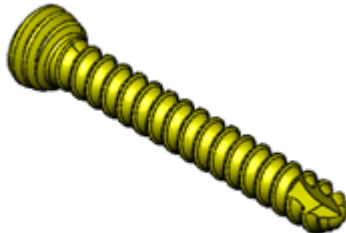

TI002.2035.042	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 42MM		
TI002.2035.043	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 43MM		
TI002.2035.044	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 44MM		
TI002.2035.045	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 45MM		
TI002.2035.046	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 46MM		
TI002.2035.047	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 47MM		
TI002.2035.048	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 48MM		
TI002.2035.049	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 49MM		
TI002.2035.050	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 50MM		
TI002.2035.051	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 51MM		
TI002.2035.052	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 52MM		
TI002.2035.053	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 53MM		
TI002.2035.054	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 54MM		
TI002.2035.055	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 55MM		
TI002.2035.056	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 56MM		
TI002.2035.057	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 57MM		
TI002.2035.058	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 58MM		
TI002.2035.059	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 59MM		
TI002.2035.060	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 60MM		
TI002.2035.061	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 61MM		
TI002.2035.062	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 62MM		
TI002.2035.063	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 63MM		
TI002.2035.064	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 64MM		
TI002.2035.065	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 65MM		
TI002.2035.066	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 66MM		
TI002.2035.067	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 67MM		
TI002.2035.068	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 68MM		
TI002.2035.069	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 69MM		
TI002.2035.070	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 70MM		
TI002.2035.071	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 71MM		
TI002.2035.072	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 72MM		
TI002.2035.073	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 73MM		
TI002.2035.074	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 74MM		
TI002.2035.075	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 75MM		

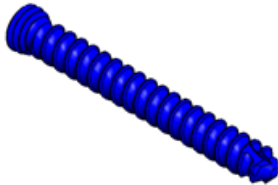
TI002.2035.076	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 76MM		
TI002.2035.077	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 77MM		
TI002.2035.078	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 78MM		
TI002.2035.079	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 79MM		
TI002.2035.080	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 80MM		
TI001.0027.006	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 06MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.0027.007	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 07MM		
TI001.0027.008	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 08MM		
TI001.0027.009	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 09MM		
TI001.0027.010	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 10MM		
TI001.0027.011	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 11MM		
TI001.0027.012	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 12MM		
TI001.0027.013	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 13MM		
TI001.0027.014	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 14MM		
TI001.0027.015	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 15MM		
TI001.0027.016	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 16MM		
TI001.0027.017	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 17MM		
TI001.0027.018	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 18MM		
TI001.0027.019	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 19MM		
TI001.0027.020	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 20MM		
TI001.0027.021	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 21MM		
TI001.0027.022	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 22MM		
TI001.0027.023	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 23MM		
TI001.0027.024	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 24MM		
TI001.0027.025	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 25MM		
TI001.0027.026	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 26MM		
TI001.0027.027	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 27MM		
TI001.0027.028	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 28MM		
TI001.0027.029	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 29MM		
TI001.0027.030	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 30MM		
TI001.0027.031	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 31MM		
TI001.0027.032	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 32MM		
TI001.0027.033	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 33MM		
TI001.0027.034	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 34MM		
TI001.0027.035	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 35MM		
TI001.0027.036	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 36MM		
TI001.0027.037	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 37MM		
TI001.0027.038	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 38MM		


TI001.0027.039	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 39MM		
TI001.0027.040	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 40MM		
TI001.0027.041	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 41MM		
TI001.0027.042	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 42MM		
TI001.0027.043	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 43MM		
TI001.0027.044	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 44MM		
TI001.0027.045	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 45MM		
TI001.0027.046	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 46MM		
TI001.0027.047	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 47MM		
TI001.0027.048	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 48MM		
TI001.0027.049	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 49MM		
TI001.0027.050	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 50MM		
TI001.0027.051	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 51MM		
TI001.0027.052	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 52MM		
TI001.0027.053	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 53MM		
TI001.0027.054	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 54MM		
TI001.0027.055	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 55MM		
TI001.0027.056	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 56MM		
TI001.0027.057	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 57MM		
TI001.0027.058	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 58MM		
TI001.0027.059	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 59MM		
TI001.0027.060	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 60MM		
TI001.0027.061	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 61MM		
TI001.0027.062	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 62MM		
TI001.0027.063	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 63MM		
TI001.0027.064	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 64MM		
TI001.0027.065	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 65MM		
TI001.0027.066	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 66MM		
TI001.0027.067	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 67MM		
TI001.0027.068	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 68MM		
TI001.0027.069	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 69MM		
TI001.0027.070	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 70MM		
TI001.0027.071	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 71MM		
TI001.0027.072	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 72MM		
TI001.0027.073	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 73MM		
TI001.0027.074	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 74MM		
TI001.0027.075	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 75MM		
TI001.0027.076	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 76MM		
TI001.0027.077	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 77MM		

TI001.0027.078	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 78MM		
TI001.0027.079	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 79MM		
TI001.0027.080	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 80MM		
TI019.3027.008	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 8,0MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI019.3027.009	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 9,0MM		
TI019.3027.010	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 10,0MM		
TI019.3027.011	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 11,0MM		
TI019.3027.012	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 12,0MM		
TI019.3027.013	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 13,0MM		
TI019.3027.014	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 14,0MM		
TI019.3027.015	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 15,0MM		
TI019.3027.016	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 16,0MM		
TI019.3027.017	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 17,0MM		
TI019.3027.018	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 18,0MM		
TI019.3027.019	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 19,0MM		
TI019.3027.020	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 20,0MM		
TI019.3027.021	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 21,0MM		
TI019.3027.022	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 22,0MM		
TI019.3027.023	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 23,0MM		
TI019.3027.024	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 24,0MM		
TI019.3027.025	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 25,0MM		
TI019.3027.026	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 26,0MM		
TI019.3027.027	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 27,0MM		
TI019.3027.028	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 28,0MM		
TI019.3027.029	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 29,0MM		
TI019.3027.030	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 30,0MM		
TI019.3027.031	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 31,0MM		
TI019.3027.032	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 32,0MM		
TI019.3027.033	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 33,0MM		
TI019.3027.034	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 34,0MM		
TI019.3027.035	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 35,0MM		
TI019.3027.036	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 36,0MM		
TI019.3027.037	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 37,0MM		
TI019.3027.038	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 38,0MM		
TI019.3027.039	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 39,0MM		
TI019.3027.040	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 40,0MM		
TI019.3027.041	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 41,0MM		
TI019.3027.042	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 42,0MM		
TI019.3027.043	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 43,0MM		

TI019.3027.044	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 44,0MM		
TI019.3027.045	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 45,0MM		
TI019.3027.046	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 46,0MM		
TI019.3027.047	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 47,0MM		
TI019.3027.048	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 48,0MM		
TI019.3027.049	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 49,0MM		
TI019.3027.050	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 50,0MM		
TI019.3027.051	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 51,0MM		
TI019.3027.052	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 52,0MM		
TI019.3027.053	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 53,0MM		
TI019.3027.054	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 54,0MM		
TI019.3027.055	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 55,0MM		
TI019.3027.056	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 56,0MM		
TI019.3027.057	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 57,0MM		
TI019.3027.058	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 59,0MM		
TI019.3027.059	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 60,0MM		
TI019.3027.060	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 60,0MM		
TI019.3027.061	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 61,0MM		
TI019.3027.062	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 62,0MM		
TI019.3027.063	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 63,0MM		
TI019.3027.064	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 64,0MM		
TI019.3027.065	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 65,0MM		
TI019.3027.066	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 66,0MM		
TI019.3027.067	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 67,0MM		
TI019.3027.068	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 68,0MM		
TI019.3027.069	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 69,0MM		
TI019.3027.070	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 70,0MM		
TI019.3027.071	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 71,0MM		
TI019.3027.072	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 72,0MM		
TI019.3027.073	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 73,0MM		
TI019.3027.074	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 74,0MM		
TI019.3027.075	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 75,0MM		
TI019.3027.076	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 76,0MM		
TI019.3027.077	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 77,0MM		
TI019.3027.078	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 78,0MM		
TI019.3027.079	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 79,0MM		
TI019.3027.080	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø2,7MM X 80,0MM		

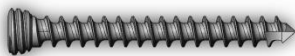
TI001.1025.008	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 8MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.1025.009	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 9MM		
TI001.1025.010	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 10MM		
TI001.1025.011	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 11MM		
TI001.1025.012	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 12MM		
TI001.1025.013	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 13MM		
TI001.1025.014	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 14MM		
TI001.1025.015	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 15MM		
TI001.1025.016	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 16MM		
TI001.1025.017	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 17MM		
TI001.1025.018	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 18MM		
TI001.1025.019	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 19MM		
TI001.1025.020	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 20MM		
TI001.1025.021	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 21MM		
TI001.1025.022	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 22MM		
TI001.1025.023	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 23MM		
TI001.1025.024	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 24MM		
TI001.1025.025	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 25MM		
TI001.1025.026	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 26MM		
TI001.1025.027	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 27MM		
TI001.1025.028	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 28MM		
TI001.1025.029	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 29MM		
TI001.1025.030	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 30MM		
TI001.1025.031	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 31MM		
TI001.1025.032	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 32MM		
TI001.1025.033	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 33MM		
TI001.1025.034	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 34MM		
TI001.1025.035	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 35MM		
TI001.1025.036	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 36MM		
TI001.1025.037	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 37MM		
TI001.1025.038	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 38MM		
TI001.1025.039	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 39MM		
TI001.1025.040	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 40MM		
TI002.1025.008	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 8MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI002.1025.009	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 9MM		
TI002.1025.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 10MM		
TI002.1025.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 11MM		
TI002.1025.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 12MM		
TI002.1025.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 13MM		


TI002.1025.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 14MM				
TI002.1025.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 15MM				
TI002.1025.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 16MM				
TI002.1025.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 17MM				
TI002.1025.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 18MM				
TI002.1025.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 19MM				
TI002.1025.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 20MM				
TI002.1025.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 21MM				
TI002.1025.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 22MM				
TI002.1025.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 23MM				
TI002.1025.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 24MM				
TI002.1025.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 25MM				
TI002.1025.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 26MM				
TI002.1025.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 27MM				
TI002.1025.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 28MM				
TI002.1025.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 29MM				
TI002.1025.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 30MM				
TI002.1025.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 31MM				
TI002.1025.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 32MM				
TI002.1025.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 33MM				
TI002.1025.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 34MM				
TI002.1025.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 35MM				
TI002.1025.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 36MM				
TI002.1025.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 37MM				
TI002.1025.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 38MM				
TI002.1025.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 39MM				
TI002.1025.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,5 X 40MM				
TI001.0025.005	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 5,0MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.0025.006	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 6,0MM				
TI001.0025.007	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 7,0MM				
TI001.0025.008	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 8,0MM				
TI001.0025.009	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 9,0MM				
TI001.0025.010	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 10,0MM				
TI001.0025.011	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 11,0MM				
TI001.0025.012	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 12,0MM				
TI001.0025.013	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 13,0MM				
TI001.0025.014	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 14,0MM				
TI001.0025.015	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 15,0MM				
TI001.0025.016	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 16,0MM				

TI001.0025.017	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 17,0MM				
TI001.0025.018	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 18,0MM				
TI001.0025.019	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 19,0MM				
TI001.0025.020	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 20,0MM				
TI001.0025.021	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 21,0MM				
TI001.0025.022	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 22,0MM				
TI001.0025.023	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 23,0MM				
TI001.0025.024	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 24,0MM				
TI001.0025.025	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 25,0MM				
TI001.0025.026	PARAFUSO BLOQUEADO Ø 2,5MM X 26,0MM				
TI019.3035.008	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 8,0MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI019.3035.009	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 9,0MM				
TI019.3035.010	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 10,0MM				
TI019.3035.011	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 11,0MM				
TI019.3035.012	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 12,0MM				
TI019.3035.013	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 13,0MM				
TI019.3035.014	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 14,0MM				
TI019.3035.015	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 15,0MM				
TI019.3035.016	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 16,0MM				
TI019.3035.017	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 17,0MM				
TI019.3035.018	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 18,0MM				
TI019.3035.019	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 19,0MM				
TI019.3035.020	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 20,0MM				
TI019.3035.021	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 21,0MM				
TI019.3035.022	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 22,0MM				
TI019.3035.023	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 23,0MM				
TI019.3035.024	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 24,0MM				
TI019.3035.025	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 25,0MM				
TI019.3035.026	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 26,0MM				
TI019.3035.027	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 27,0MM				
TI019.3035.028	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 28,0MM				
TI019.3035.029	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 29,0MM				
TI019.3035.030	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 30,0MM				
TI019.3035.031	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 31,0MM				
TI019.3035.032	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 32,0MM				
TI019.3035.033	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 33,0MM				
TI019.3035.034	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 34,0MM				
TI019.3035.035	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 35,0MM				
TI019.3035.036	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 36,0MM				


TI019.3035.037	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 37,0MM		
TI019.3035.038	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 38,0MM		
TI019.3035.039	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 39,0MM		
TI019.3035.040	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 40,0MM		
TI019.3035.041	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 41,0MM		
TI019.3035.042	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 42,0MM		
TI019.3035.043	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 43,0MM		
TI019.3035.044	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 44,0MM		
TI019.3035.045	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 45,0MM		
TI019.3035.046	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 46,0MM		
TI019.3035.047	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 47,0MM		
TI019.3035.048	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 48,0MM		
TI019.3035.049	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 49,0MM		
TI019.3035.050	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 50,0MM		
TI019.3035.051	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 51,0MM		
TI019.3035.052	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 52,0MM		
TI019.3035.053	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 53,0MM		
TI019.3035.054	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 54,0MM		
TI019.3035.055	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 55,0MM		
TI019.3035.056	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 56,0MM		
TI019.3035.057	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 57,0MM		
TI019.3035.058	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 59,0MM		
TI019.3035.059	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 60,0MM		
TI019.3035.060	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 60,0MM		
TI019.3035.061	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 61,0MM		
TI019.3035.062	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 62,0MM		
TI019.3035.063	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 63,0MM		
TI019.3035.064	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 64,0MM		
TI019.3035.065	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 65,0MM		
TI019.3035.066	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 66,0MM		
TI019.3035.067	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 67,0MM		
TI019.3035.068	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 68,0MM		
TI019.3035.069	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 69,0MM		
TI019.3035.070	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 70,0MM		
TI019.3035.071	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 71,0MM		
TI019.3035.072	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 72,0MM		
TI019.3035.073	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 73,0MM		
TI019.3035.074	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 74,0MM		
TI019.3035.075	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 75,0MM		

TI019.3035.076	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 76,0MM		
TI019.3035.077	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 77,0MM		
TI019.3035.078	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 78,0MM		
TI019.3035.079	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 79,0MM		
TI019.3035.080	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 80,0MM		
TI019.3035.081	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 81,0MM		
TI019.3035.082	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 82,0MM		
TI019.3035.083	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 83,0MM		
TI019.3035.084	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 84,0MM		
TI019.3035.085	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 85,0MM		
TI019.3035.086	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 86,0MM		
TI019.3035.087	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 87,0MM		
TI019.3035.088	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 88,0MM		
TI019.3035.089	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 89,0MM		
TI019.3035.090	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 90,0MM		
TI019.3035.091	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 91,0MM		
TI019.3035.092	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 92,0MM		
TI019.3035.093	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 93,0MM		
TI019.3035.094	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 94,0MM		
TI019.3035.095	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 95,0MM		
TI019.3035.096	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 96,0MM		
TI019.3035.097	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 97,0MM		
TI019.3035.098	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 98,0MM		
TI019.3035.099	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 99,0MM		
TI019.3035.100	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 100,0MM		
TI019.3035.101	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 101,0MM		
TI019.3035.102	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 102,0MM		
TI019.3035.103	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 103,0MM		
TI019.3035.104	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 104,0MM		
TI019.3035.105	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 105,0MM		
TI019.3035.106	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 106,0MM		
TI019.3035.107	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 107,0MM		
TI019.3035.108	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 108,0MM		
TI019.3035.109	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 109,0MM		
TI019.3035.110	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 110,0MM		
TI019.3035.111	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 111,0MM		
TI019.3035.112	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 112,0MM		
TI019.3035.113	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 113,0MM		
TI019.3035.114	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 114,0MM		

TI019.3035.115	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 115,0MM		
TI019.3035.116	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 116,0MM		
TI019.3035.117	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 117,0MM		
TI019.3035.118	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 118,0MM		
TI019.3035.119	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 119,0MM		
TI019.3035.120	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO Ø3,5MM X 120,0MM		
TI001.1027.012	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 12MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.1027.013	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 13MM		
TI001.1027.014	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 14MM		
TI001.1027.015	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 15MM		
TI001.1027.016	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 16MM		
TI001.1027.017	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 17MM		
TI001.1027.018	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 18MM		
TI001.1027.019	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 19MM		
TI001.1027.020	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 20MM		
TI001.1027.021	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 21MM		
TI001.1027.022	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 22MM		
TI001.1027.023	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 23MM		
TI001.1027.024	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 24MM		
TI001.1027.025	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 25MM		
TI001.1027.026	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 26MM		
TI001.1027.027	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 27MM		
TI001.1027.028	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 28MM		
TI001.1027.029	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 29MM		
TI001.1027.030	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 30MM		
TI001.1027.031	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 31MM		
TI001.1027.032	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 32MM		
TI001.1027.033	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 33MM		
TI001.1027.034	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 34MM		
TI001.1027.035	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 35MM		
TI001.1027.036	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 36MM		
TI001.1027.037	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 37MM		
TI001.1027.038	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 38MM		
TI001.1027.039	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 39MM		
TI001.1027.040	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 40MM		
TI001.1027.041	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 41MM		
TI001.1027.042	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 42MM		
TI001.1027.043	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 43MM		


TI001.1027.044	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 44MM				
TI001.1027.045	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 45MM				
TI001.1027.046	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 46MM				
TI001.1027.047	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 47MM				
TI001.1027.048	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 48MM				
TI001.1027.049	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 49MM				
TI001.1027.050	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 50MM				
TI001.1027.051	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 51MM				
TI001.1027.052	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 52MM				
TI001.1027.053	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 53MM				
TI001.1027.054	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 54MM				
TI001.1027.055	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 55MM				
TI001.1027.056	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 56MM				
TI001.1027.057	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 57MM				
TI001.1027.058	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 58MM				
TI001.1027.059	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 59MM				
TI001.1027.060	PARAFUSO BLOQUEADO Ø2,7MM X 60MM				
TI002.0027.006	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 06MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI002.0027.007	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 07MM				
TI002.0027.008	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 08MM				
TI002.0027.009	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 09MM				
TI002.0027.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 10MM				
TI002.0027.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 11MM				
TI002.0027.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 12MM				
TI002.0027.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 13MM				
TI002.0027.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 14MM				
TI002.0027.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 15MM				
TI002.0027.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 16MM				
TI002.0027.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 17MM				
TI002.0027.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 18MM				
TI002.0027.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 19MM				
TI002.0027.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 20MM				
TI002.0027.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 21MM				
TI002.0027.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 22MM				
TI002.0027.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 23MM				
TI002.0027.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 24MM				
TI002.0027.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 25MM				
TI002.0027.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 26MM				
TI002.0027.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 27MM				

T1002.0027.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 28MM		
T1002.0027.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 29MM		
T1002.0027.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 30MM		
T1002.0027.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 31MM		
T1002.0027.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 32MM		
T1002.0027.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 33MM		
T1002.0027.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 34MM		
T1002.0027.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 35MM		
T1002.0027.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 36MM		
T1002.0027.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 37MM		
T1002.0027.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 38MM		
T1002.0027.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 39MM		
T1002.0027.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 40MM		
T1002.0027.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 41MM		
T1002.0027.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 42MM		
T1002.0027.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 43MM		
T1002.0027.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 44MM		
T1002.0027.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 45MM		
T1002.0027.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 46MM		
T1002.0027.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 47MM		
T1002.0027.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 48MM		
T1002.0027.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 49MM		
T1002.0027.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 50MM		
T1002.0027.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 51MM		
T1002.0027.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 52MM		
T1002.0027.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 53MM		
T1002.0027.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 54MM		
T1002.0027.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 55MM		
T1002.0027.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 56MM		
T1002.0027.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 57MM		
T1002.0027.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 58MM		
T1002.0027.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 59MM		
T1002.0027.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 60MM		
T1002.0027.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 61MM		
T1002.0027.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 62MM		
T1002.0027.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 63MM		
T1002.0027.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 64MM		
T1002.0027.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 65MM		
T1002.0027.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 66MM		


T1002.0027.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 67MM				
T1002.0027.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 68MM				
T1002.0027.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 69MM				
T1002.0027.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 70MM				
T1002.0027.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 71MM				
T1002.0027.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 72MM				
T1002.0027.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 73MM				
T1002.0027.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 74MM				
T1002.0027.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 75MM				
T1002.0027.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 76MM				
T1002.0027.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 77MM				
T1002.0027.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 78MM				
T1002.0027.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 79MM				
T1002.0027.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,7MM X 80MM				
T1001.0035.010	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 10,0MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
T1001.0035.011	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 11,0MM				
T1001.0035.012	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 12,0MM				
T1001.0035.013	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 13,0MM				
T1001.0035.014	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 14,0MM				
T1001.0035.015	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 15,0MM				
T1001.0035.016	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 16,0MM				
T1001.0035.017	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 17,0MM				
T1001.0035.018	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 18,0MM				
T1001.0035.019	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 19,0MM				
T1001.0035.020	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 20,0MM				
T1001.0035.021	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 21,0MM				
T1001.0035.022	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 22,0MM				
T1001.0035.023	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 23,0MM				
T1001.0035.024	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 24,0MM				
T1001.0035.025	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 25,0MM				
T1001.0035.026	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 26,0MM				
T1001.0035.027	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 27,0MM				
T1001.0035.028	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 28,0MM				
T1001.0035.029	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 29,0MM				
T1001.0035.030	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 30,0MM				
T1001.0035.031	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 31,0MM				
T1001.0035.032	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 32,0MM				
T1001.0035.033	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 33,0MM				
T1001.0035.034	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 34,0MM				

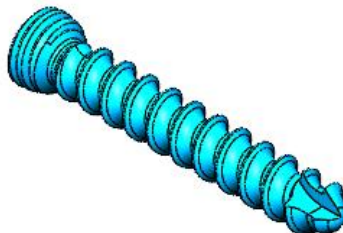
T1001.0035.035	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 35,0MM		
T1001.0035.036	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 36,0MM		
T1001.0035.037	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 37,0MM		
T1001.0035.038	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 38,0MM		
T1001.0035.039	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 39,0MM		
T1001.0035.040	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 40,0MM		
T1001.0035.041	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 41,0MM		
T1001.0035.042	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 42,0MM		
T1001.0035.043	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 43,0MM		
T1001.0035.044	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 44,0MM		
T1001.0035.045	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 45,0MM		
T1001.0035.046	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 46,0MM		
T1001.0035.047	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 47,0MM		
T1001.0035.048	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 48,0MM		
T1001.0035.049	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 49,0MM		
T1001.0035.050	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 50,0MM		
T1001.0035.051	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 51,0MM		
T1001.0035.052	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 52,0MM		
T1001.0035.053	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 53,0MM		
T1001.0035.054	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 54,0MM		
T1001.0035.055	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 55,0MM		
T1001.0035.056	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 56,0MM		
T1001.0035.057	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 57,0MM		
T1001.0035.058	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 59,0MM		
T1001.0035.059	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 60,0MM		
T1001.0035.060	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 60,0MM		
T1001.0035.061	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 61,0MM		
T1001.0035.062	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 62,0MM		
T1001.0035.063	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 63,0MM		
T1001.0035.064	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 64,0MM		
T1001.0035.065	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 65,0MM		
T1001.0035.066	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 66,0MM		
T1001.0035.067	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 67,0MM		
T1001.0035.068	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 68,0MM		
T1001.0035.069	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 69,0MM		
T1001.0035.070	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 70,0MM		
T1001.0035.071	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 71,0MM		
T1001.0035.072	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 72,0MM		
T1001.0035.073	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 73,0MM		

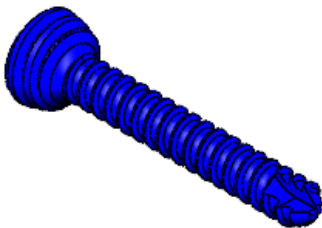
TI001.0035.074	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 74,0MM		
TI001.0035.075	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 75,0MM		
TI001.0035.076	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 76,0MM		
TI001.0035.077	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 77,0MM		
TI001.0035.078	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 78,0MM		
TI001.0035.079	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 79,0MM		
TI001.0035.080	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 80,0MM		
TI001.0035.081	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 81,0MM		
TI001.0035.082	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 82,0MM		
TI001.0035.083	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 83,0MM		
TI001.0035.084	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 84,0MM		
TI001.0035.085	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 85,0MM		
TI001.0035.086	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 86,0MM		
TI001.0035.087	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 87,0MM		
TI001.0035.088	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 88,0MM		
TI001.0035.089	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 89,0MM		
TI001.0035.090	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 90,0MM		
TI001.0035.091	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 91,0MM		
TI001.0035.092	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 92,0MM		
TI001.0035.093	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 93,0MM		
TI001.0035.094	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 94,0MM		
TI001.0035.095	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 95,0MM		
TI001.0035.096	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 96,0MM		
TI001.0035.097	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 97,0MM		
TI001.0035.098	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 98,0MM		
TI001.0035.099	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 99,0MM		
TI001.0035.100	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 100,0MM		
TI001.0035.101	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 101,0MM		
TI001.0035.102	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 102,0MM		
TI001.0035.103	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 103,0MM		
TI001.0035.104	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 104,0MM		
TI001.0035.105	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 105,0MM		
TI001.0035.106	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 106,0MM		
TI001.0035.107	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 107,0MM		
TI001.0035.108	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 108,0MM		
TI001.0035.109	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 109,0MM		
TI001.0035.110	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 110,0MM		
TI001.0035.111	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 111,0MM		
TI001.0035.112	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 112,0MM		

TI001.0035.113	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 113,0MM				
TI001.0035.114	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 114,0MM				
TI001.0035.115	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 115,0MM				
TI001.0035.116	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 116,0MM				
TI001.0035.117	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 117,0MM				
TI001.0035.118	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 118,0MM				
TI001.0035.119	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 119,0MM				
TI001.0035.120	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 120,0MM				
TI001.0035.121	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 121,0MM				
TI001.0035.122	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 122,0MM				
TI001.0035.123	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 123,0MM				
TI001.0035.124	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 124,0MM				
TI001.0035.125	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 125,0MM				
TI001.0035.126	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 126,0MM				
TI001.0035.127	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 127,0MM				
TI001.0035.128	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 128,0MM				
TI001.0035.129	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 129,0MM				
TI001.0035.130	PARAFUSO BLOQUEADO Ø3,5MM X 130,0MM				
TI002.0035.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 10,0MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI002.0035.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 11,0MM				
TI002.0035.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 12,0MM				
TI002.0035.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 13,0MM				
TI002.0035.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 14,0MM				
TI002.0035.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 15,0MM				
TI002.0035.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 16,0MM				
TI002.0035.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 17,0MM				
TI002.0035.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 18,0MM				
TI002.0035.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 19,0MM				
TI002.0035.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 20,0MM				
TI002.0035.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 21,0MM				
TI002.0035.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 22,0MM				
TI002.0035.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 23,0MM				
TI002.0035.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 24,0MM				
TI002.0035.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 25,0MM				
TI002.0035.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 26,0MM				
TI002.0035.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 27,0MM				
TI002.0035.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 28,0MM				
TI002.0035.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 29,0MM				
TI002.0035.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 30,0MM				

TI002.0035.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X31,0MM		
TI002.0035.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 32,0MM		
TI002.0035.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 33,0MM		
TI002.0035.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 34,0MM		
TI002.0035.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 35,0MM		
TI002.0035.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 36,0MM		
TI002.0035.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 37,0MM		
TI002.0035.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 38,0MM		
TI002.0035.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 39,0MM		
TI002.0035.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 40,0MM		
TI002.0035.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 41,0MM		
TI002.0035.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 42,0MM		
TI002.0035.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 43,0MM		
TI002.0035.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 44,0MM		
TI002.0035.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 45,0MM		
TI002.0035.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 46,0MM		
TI002.0035.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 47,0MM		
TI002.0035.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 48,0MM		
TI002.0035.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 49,0MM		
TI002.0035.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 50,0MM		
TI002.0035.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 51,0MM		
TI002.0035.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X52,0MM		
TI002.0035.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 53,0MM		
TI002.0035.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 54,0MM		
TI002.0035.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 55,0MM		
TI002.0035.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 56,0MM		
TI002.0035.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 57,0MM		
TI002.0035.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 59,0MM		
TI002.0035.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 60,0MM		
TI002.0035.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 60,0MM		
TI002.0035.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 61,0MM		
TI002.0035.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 62,0MM		
TI002.0035.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 63,0MM		
TI002.0035.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 64,0MM		
TI002.0035.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 65,0MM		
TI002.0035.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 66,0MM		
TI002.0035.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 67,0MM		
TI002.0035.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 68,0MM		
TI002.0035.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 69,0MM		

T1002.0035.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 70,0MM				
T1002.0035.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 71,0MM				
T1002.0035.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 72,0MM				
T1002.0035.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 73,0MM				
T1002.0035.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 74,0MM				
T1002.0035.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 75,0MM				
T1002.0035.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 76,0MM				
T1002.0035.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 77,0MM				
T1002.0035.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 78,0MM				
T1002.0035.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 79,0MM				
T1002.0035.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 80,0MM				
T1002.0035.081	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 81,0MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
T1002.0035.082	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 82,0MM				
T1002.0035.083	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 83,0MM				
T1002.0035.084	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 84,0MM				
T1002.0035.085	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 85,0MM				
T1002.0035.086	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 86,0MM				
T1002.0035.087	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 87,0MM				
T1002.0035.088	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 88,0MM				
T1002.0035.089	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 89,0MM				
T1002.0035.090	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 90,0MM				
T1002.0035.091	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 91,0MM				
T1002.0035.092	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 92,0MM				
T1002.0035.093	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 93,0MM				
T1002.0035.094	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 94,0MM				
T1002.0035.095	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 95,0MM				
T1002.0035.096	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 96,0MM				
T1002.0035.097	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 97,0MM				
T1002.0035.098	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 98,0MM				
T1002.0035.099	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 99,0MM				
T1002.0035.100	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 100,0MM				
T1002.0035.101	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 101,0MM				
T1002.0035.102	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 102,0MM				
T1002.0035.103	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 103,0MM				
T1002.0035.104	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 104,0MM				
T1002.0035.105	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 105,0MM				
T1002.0035.106	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 106,0MM				
T1002.0035.107	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 107,0MM				
T1002.0035.108	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 108,0MM				

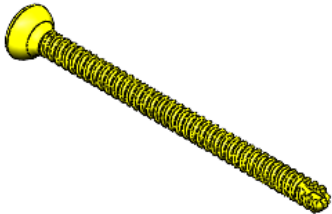
TI002.0035.109	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 109,0MM				
TI002.0035.110	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 110,0MM				
TI002.0035.111	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 111,0MM				
TI002.0035.112	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 112,0MM				
TI002.0035.113	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 113,0MM				
TI002.0035.114	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 114,0MM				
TI002.0035.115	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 115,0MM				
TI002.0035.116	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 116,0MM				
TI002.0035.117	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 117,0MM				
TI002.0035.118	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 118,0MM				
TI002.0035.119	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 119,0MM				
TI002.0035.120	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 120,0MM				
TI002.0035.121	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 121,0MM				
TI002.0035.122	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 122,0MM				
TI002.0035.123	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 123,0MM				
TI002.0035.124	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 124,0MM				
TI002.0035.125	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 125,0MM				
TI002.0035.126	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 126,0MM				
TI002.0035.127	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 127,0MM				
TI002.0035.128	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 128,0MM				
TI002.0035.129	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 129,0MM				
TI002.0035.130	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO Ø3,5MM X 130,0MM				
TI001.0030.008	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 08MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.0030.009	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 09MM				
TI001.0030.010	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 10MM				
TI001.0030.011	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 11MM				
TI001.0030.012	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 12MM				
TI001.0030.013	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 13MM				
TI001.0030.014	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 14MM				
TI001.0030.015	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 15MM				
TI001.0030.016	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 16MM				
TI001.0030.017	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 17MM				
TI001.0030.018	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 18MM				
TI001.0030.019	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 19MM				
TI001.0030.020	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 20MM				
TI001.0030.021	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 21MM				
TI001.0030.022	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 22MM				
TI001.0030.023	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 23MM				
TI001.0030.024	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 24MM				

TI001.0030.025	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 25MM				
TI001.0030.026	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 26MM				
TI001.0030.027	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 27MM				
TI001.0030.028	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 28MM				
TI001.0030.029	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 29MM				
TI001.0030.030	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 30MM				
TI001.0030.031	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 31MM				
TI001.0030.032	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 32MM				
TI001.0030.033	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 33MM				
TI001.0030.034	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 34MM				
TI001.0030.035	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 35MM				
TI001.0030.036	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 36MM				
TI001.0030.037	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 37MM				
TI001.0030.038	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 38MM				
TI001.0030.039	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 39MM				
TI001.0030.040	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 40MM				
TI001.1020.008	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 8MM			TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.1020.009	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 9MM				
TI001.1020.010	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 10MM				
TI001.1020.011	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 11MM				
TI001.1020.012	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 12MM				
TI001.1020.013	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 13MM				
TI001.1020.014	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 14MM				
TI001.1020.015	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 15MM				
TI001.1020.016	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 16MM				
TI001.1020.017	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 17MM				
TI001.1020.018	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 18MM				
TI001.1020.019	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 19MM				
TI001.1020.020	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 20MM				
TI001.1020.021	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 21MM				
TI001.1020.022	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 22MM				
TI001.1020.023	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 23MM				
TI001.1020.024	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 24MM				
TI001.1020.025	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 25MM				
TI001.1020.026	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 26MM				
TI001.1020.027	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 27MM				
TI001.1020.028	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 28MM				
TI001.1020.029	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 29MM				
TI001.1020.030	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 30MM				

TI001.1020.031	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 31MM		
TI001.1020.032	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 32MM		
TI001.1020.033	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 33MM		
TI001.1020.034	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 34MM		
TI001.1020.035	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 35MM		
TI001.1020.036	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 36MM		
TI001.1020.037	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 37MM		
TI001.1020.038	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 38MM		
TI001.1020.039	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 39MM		
TI001.1020.040	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 40MM		
TI001.1020.041	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 41MM		
TI001.1020.042	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 42MM		
TI001.1020.043	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 43MM		
TI001.1020.044	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 44MM		
TI001.1020.045	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 45MM		
TI001.1020.046	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 46MM		
TI001.1020.047	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 47MM		
TI001.1020.048	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 48MM		
TI001.1020.049	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 49MM		
TI001.1020.050	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 50MM		
TI001.1020.051	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 51MM		
TI001.1020.052	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 52MM		
TI001.1020.053	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 53MM		
TI001.1020.054	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 54MM		
TI001.1020.055	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 55MM		
TI001.1020.056	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 56MM		
TI001.1020.057	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 57MM		
TI001.1020.058	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 58MM		
TI001.1020.059	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 59MM		
TI001.1020.060	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 60MM		
TI001.1020.061	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 61MM		
TI001.1020.062	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 62MM		
TI001.1020.063	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 63MM		
TI001.1020.064	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 64MM		
TI001.1020.065	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 65MM		
TI001.1020.066	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 66MM		
TI001.1020.067	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 67MM		
TI001.1020.068	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 68MM		
TI001.1020.069	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 69MM		

TI001.1020.070	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 70MM		
TI001.1020.071	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 71MM		
TI001.1020.072	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 72MM		
TI001.1020.073	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 73MM		
TI001.1020.074	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 74MM		
TI001.1020.075	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 75MM		
TI001.1020.076	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 76MM		
TI001.1020.077	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 77MM		
TI001.1020.078	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 78MM		
TI001.1020.079	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 79MM		
TI001.1020.080	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 80MM		
TI001.1020.081	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 81MM		
TI001.1020.082	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 82MM		
TI001.1020.083	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 83MM		
TI001.1020.084	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 84MM		
TI001.1020.085	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 85MM		
TI001.1020.086	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 86MM		
TI001.1020.087	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 87MM		
TI001.1020.088	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 88MM		
TI001.1020.089	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 89MM		
TI001.1020.090	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 90MM		
TI001.1020.091	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 91MM		
TI001.1020.092	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 92MM		
TI001.1020.093	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 93MM		
TI001.1020.094	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 94MM		
TI001.1020.095	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 95MM		
TI001.1020.096	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 96MM		
TI001.1020.097	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 97MM		
TI001.1020.098	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 98MM		
TI001.1020.099	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 99MM		
TI001.1020.100	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 100MM		
TI001.1020.101	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 101MM		
TI001.1020.102	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 102MM		
TI001.1020.103	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 103MM		
TI001.1020.104	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 104MM		
TI001.1020.105	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 105MM		
TI001.1020.106	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 106MM		
TI001.1020.107	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 107MM		
TI001.1020.108	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 108MM		

TI001.1020.109	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 109MM		
TI001.1020.110	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 110MM		
TI001.1020.111	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 111MM		
TI001.1020.112	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 112MM		
TI001.1020.113	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 113MM		
TI001.1020.114	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 114MM		
TI001.1020.115	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 115MM		
TI001.1020.116	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 116MM		
TI001.1020.117	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 117MM		
TI001.1020.118	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 118MM		
TI001.1020.119	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 119MM		
TI001.1020.120	PARAFUSO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 120MM		
TI002.0030.008	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 8MM		
TI002.0030.009	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 9MM		
TI002.0030.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 10MM		
TI002.0030.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 11MM		
TI002.0030.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 12MM		
TI002.0030.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 13MM		
TI002.0030.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 14MM		
TI002.0030.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 15MM		
TI002.0030.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 16MM		
TI002.0030.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 17MM		
TI002.0030.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 18MM		
TI002.0030.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 19MM		
TI002.0030.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 20MM		
TI002.0030.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 21MM		
TI002.0030.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 22MM		
TI002.0030.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 23MM		
TI002.0030.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 24MM		
TI002.0030.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 25MM		
TI002.0030.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 26MM		
TI002.0030.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 27MM		
TI002.0030.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 28MM		
TI002.0030.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 29MM		
TI002.0030.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 30MM		
TI002.0030.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 31MM		
TI002.0030.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 32MM		
TI002.0030.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 33MM		
TI002.0030.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 34MM		

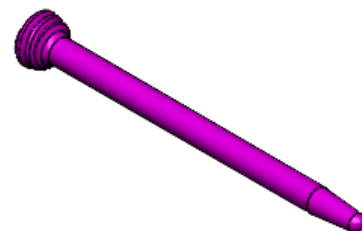
T1002.0030.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 35MM		
T1002.0030.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 36MM		
T1002.0030.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 37MM		
T1002.0030.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 38MM		
T1002.0030.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 39MM		
T1002.0030.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø3,0 X 40MM		
T1002.1020.008	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 8MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
T1002.1020.009	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 9MM		
T1002.1020.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 10MM		
T1002.1020.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 11MM		
T1002.1020.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 12MM		
T1002.1020.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 13MM		
T1002.1020.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 14MM		
T1002.1020.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 15MM		
T1002.1020.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 16MM		
T1002.1020.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 17MM		
T1002.1020.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 18MM		
T1002.1020.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 19MM		
T1002.1020.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 20MM		
T1002.1020.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 21MM		
T1002.1020.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 22MM		
T1002.1020.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 23MM		
T1002.1020.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 24MM		
T1002.1020.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 25MM		
T1002.1020.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 26MM		
T1002.1020.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 27MM		
T1002.1020.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 28MM		
T1002.1020.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 29MM		
T1002.1020.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 30MM		
T1002.1020.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 31MM		
T1002.1020.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 32MM		
T1002.1020.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 33MM		
T1002.1020.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 34MM		
T1002.1020.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 35MM		
T1002.1020.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 36MM		
T1002.1020.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 37MM		
T1002.1020.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 38MM		
T1002.1020.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 39MM		
T1002.1020.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 40MM		

TI002.1020.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 41MM		
TI002.1020.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 42MM		
TI002.1020.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 43MM		
TI002.1020.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 44MM		
TI002.1020.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 45MM		
TI002.1020.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 46MM		
TI002.1020.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 47MM		
TI002.1020.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 48MM		
TI002.1020.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 49MM		
TI002.1020.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 50MM		
TI002.1020.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 51MM		
TI002.1020.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 52MM		
TI002.1020.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 53MM		
TI002.1020.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 54MM		
TI002.1020.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 55MM		
TI002.1020.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 56MM		
TI002.1020.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 57MM		
TI002.1020.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 58MM		
TI002.1020.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 59MM		
TI002.1020.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 60MM		
TI002.1020.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 61MM		
TI002.1020.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 62MM		
TI002.1020.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 63MM		
TI002.1020.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 64MM		
TI002.1020.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 65MM		
TI002.1020.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 66MM		
TI002.1020.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 67MM		
TI002.1020.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 68MM		
TI002.1020.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 69MM		
TI002.1020.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 70MM		
TI002.1020.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 71MM		
TI002.1020.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 72MM		
TI002.1020.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 73MM		
TI002.1020.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 74MM		
TI002.1020.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 75MM		
TI002.1020.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 76MM		
TI002.1020.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 77MM		
TI002.1020.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 78MM		
TI002.1020.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 79MM		

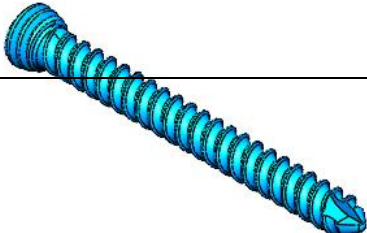
TI002.1020.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 80MM		
TI002.1020.081	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 81MM		
TI002.1020.082	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 82MM		
TI002.1020.083	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 83MM		
TI002.1020.084	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 84MM		
TI002.1020.085	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 85MM		
TI002.1020.086	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 86MM		
TI002.1020.087	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 87MM		
TI002.1020.088	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 88MM		
TI002.1020.089	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 89MM		
TI002.1020.090	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 90MM		
TI002.1020.091	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 91MM		
TI002.1020.092	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 92MM		
TI002.1020.093	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 93MM		
TI002.1020.094	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 94MM		
TI002.1020.095	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 95MM		
TI002.1020.096	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 96MM		
TI002.1020.097	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 97MM		
TI002.1020.098	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 98MM		
TI002.1020.099	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 99MM		
TI002.1020.100	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 100MM		
TI002.1020.101	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 101MM		
TI002.1020.102	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 102MM		
TI002.1020.103	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 103MM		
TI002.1020.104	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 104MM		
TI002.1020.105	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 105MM		
TI002.1020.106	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 106MM		
TI002.1020.107	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 107MM		
TI002.1020.108	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 108MM		
TI002.1020.109	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 109MM		
TI002.1020.110	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 110MM		
TI002.1020.111	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 111MM		
TI002.1020.112	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 112MM		
TI002.1020.113	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 113MM		
TI002.1020.114	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 114MM		
TI002.1020.115	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 115MM		
TI002.1020.116	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 116MM		
TI002.1020.117	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 117MM		
TI002.1020.118	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 118MM		

TI002.1020.119	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 119MM		
TI002.1020.120	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 120MM		
TI020.5020.008	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 8MM		
TI020.5020.009	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 9MM		
TI020.5020.010	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 10MM		
TI020.5020.011	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 11MM		
TI020.5020.012	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 12MM		
TI020.5020.013	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 13MM		
TI020.5020.014	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 14MM		
TI020.5020.015	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 15MM		
TI020.5020.016	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 16MM		
TI020.5020.017	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 17MM		
TI020.5020.018	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 18MM		
TI020.5020.019	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 19MM		
TI020.5020.020	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 20MM		
TI020.5020.021	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 21MM		
TI020.5020.022	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 22MM		
TI020.5020.023	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 23MM		
TI020.5020.024	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 24MM		
TI020.5020.025	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 25MM		
TI020.5020.026	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 26MM		
TI020.5020.027	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 27MM		
TI020.5020.028	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 28MM		
TI020.5020.029	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 29MM		
TI020.5020.030	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 30MM		
TI020.5020.031	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 31MM		
TI020.5020.032	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 32MM		
TI020.5020.033	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 33MM		
TI020.5020.034	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 34MM		
TI020.5020.035	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 35MM		
TI020.5020.036	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 36MM		
TI020.5020.037	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 37MM		
TI020.5020.038	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 38MM		
TI020.5020.039	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 39MM		
TI020.5020.040	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 40MM		
TI020.5020.041	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 41MM		
TI020.5020.042	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 42MM		
TI020.5020.043	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 43MM		
TI020.5020.044	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 44MM		

TITÂNIO
LIGA - ASTM
F 136



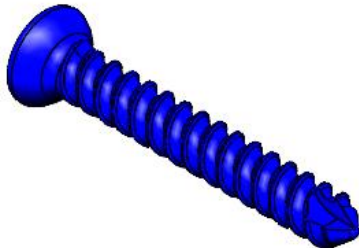
TI020.5020.045	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 45MM		
TI020.5020.046	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 46MM		
TI020.5020.047	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 47MM		
TI020.5020.048	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 48MM		
TI020.5020.049	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 49MM		
TI020.5020.050	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 50MM		
TI020.5020.051	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 51MM		
TI020.5020.052	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 52MM		
TI020.5020.053	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 53MM		
TI020.5020.054	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 54MM		
TI020.5020.055	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 55MM		
TI020.5020.056	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 56MM		
TI020.5020.057	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 57MM		
TI020.5020.058	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 58MM		
TI020.5020.059	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 59MM		
TI020.5020.060	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 60MM		
TI020.5020.061	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 61MM		
TI020.5020.062	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 62MM		
TI020.5020.063	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 63MM		
TI020.5020.064	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 64MM		
TI020.5020.065	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 65MM		
TI020.5020.066	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 66MM		
TI020.5020.067	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 67MM		
TI020.5020.068	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 68MM		
TI020.5020.069	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 69MM		
TI020.5020.070	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 70MM		
TI020.5020.071	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 71MM		
TI020.5020.072	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 72MM		
TI020.5020.073	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 73MM		
TI020.5020.074	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 74MM		
TI020.5020.075	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 75MM		
TI020.5020.076	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 76MM		
TI020.5020.077	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 77MM		
TI020.5020.078	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 78MM		
TI020.5020.079	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 79MM		
TI020.5020.080	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 80MM		
TI020.5020.081	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 81MM		
TI020.5020.082	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 82MM		
TI020.5020.083	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 83MM		

TI020.5020.084	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 84MM		
TI020.5020.085	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 85MM		
TI020.5020.086	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 86MM		
TI020.5020.087	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 87MM		
TI020.5020.088	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 88MM		
TI020.5020.089	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 89MM		
TI020.5020.090	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 90MM		
TI020.5020.091	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 91MM		
TI020.5020.092	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 92MM		
TI020.5020.093	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 93MM		
TI020.5020.094	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 94MM		
TI020.5020.095	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 95MM		
TI020.5020.096	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 96MM		
TI020.5020.097	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 97MM		
TI020.5020.098	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 98MM		
TI020.5020.099	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 99MM		
TI020.5020.100	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 100MM		
TI020.5020.101	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 101MM		
TI020.5020.102	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 102MM		
TI020.5020.103	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 103MM		
TI020.5020.104	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 104MM		
TI020.5020.105	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 105MM		
TI020.5020.106	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 106MM		
TI020.5020.107	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 107MM		
TI020.5020.108	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 108MM		
TI020.5020.109	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 109MM		
TI020.5020.110	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 110MM		
TI020.5020.111	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 111MM		
TI020.5020.112	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 112MM		
TI020.5020.113	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 113MM		
TI020.5020.114	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 114MM		
TI020.5020.115	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 115MM		
TI020.5020.116	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 116MM		
TI020.5020.117	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 117MM		
TI020.5020.118	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 118MM		
TI020.5020.119	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 119MM		
TI020.5020.120	PINO LISO BLOQUEADO TX8 Ø2,0 X 120MM		
TI001.0127.008	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 8MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI001.0127.009	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 9MM		

TI001.0127.010	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 10MM		
TI001.0127.011	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 11MM		
TI001.0127.012	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 12MM		
TI001.0127.013	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 13MM		
TI001.0127.014	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 14MM		
TI001.0127.015	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 15MM		
TI001.0127.016	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 16MM		
TI001.0127.017	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 17MM		
TI001.0127.018	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 18MM		
TI001.0127.019	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 19MM		
TI001.0127.020	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 20MM		
TI001.0127.021	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 21MM		
TI001.0127.022	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 22MM		
TI001.0127.023	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 23MM		
TI001.0127.024	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 24MM		
TI001.0127.025	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 25MM		
TI001.0127.026	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 26MM		
TI001.0127.027	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 27MM		
TI001.0127.028	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 28MM		
TI001.0127.029	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 29MM		
TI001.0127.030	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 30MM		
TI001.0127.031	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 31MM		
TI001.0127.032	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 32MM		
TI001.0127.033	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 33MM		
TI001.0127.034	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 34MM		
TI001.0127.035	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 35MM		
TI001.0127.036	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 36MM		
TI001.0127.037	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 37MM		
TI001.0127.038	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 38MM		
TI001.0127.039	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 39MM		
TI001.0127.040	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 40MM		
TI001.0127.041	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 41MM		
TI001.0127.042	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 42MM		
TI001.0127.043	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 43MM		
TI001.0127.044	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 44MM		
TI001.0127.045	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 45MM		
TI001.0127.046	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 46MM		
TI001.0127.047	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 47MM		
TI001.0127.048	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 48MM		

TI001.0127.049	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 49MM		
TI001.0127.050	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 50MM		
TI001.0127.051	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 51MM		
TI001.0127.052	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 52MM		
TI001.0127.053	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 53MM		
TI001.0127.054	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 54MM		
TI001.0127.055	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 55MM		
TI001.0127.056	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 56MM		
TI001.0127.057	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 57MM		
TI001.0127.058	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 58MM		
TI001.0127.059	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 59MM		
TI001.0127.060	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 60MM		
TI001.0127.061	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 61MM		
TI001.0127.062	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 62MM		
TI001.0127.063	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 63MM		
TI001.0127.064	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 64MM		
TI001.0127.065	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 65MM		
TI001.0127.066	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 66MM		
TI001.0127.067	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 67MM		
TI001.0127.068	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 68MM		
TI001.0127.069	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 69MM		
TI001.0127.070	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 70MM		
TI001.0127.071	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 71MM		
TI001.0127.072	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 72MM		
TI001.0127.073	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 73MM		
TI001.0127.074	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 74MM		
TI001.0127.075	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 75MM		
TI001.0127.076	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 76MM		
TI001.0127.077	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 77MM		
TI001.0127.078	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 78MM		
TI001.0127.079	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 79MM		
TI001.0127.080	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 80MM		
TI001.0127.081	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 81MM		
TI001.0127.082	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 82MM		
TI001.0127.083	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 83MM		
TI001.0127.084	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 84MM		
TI001.0127.085	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 85MM		
TI001.0127.086	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 86MM		
TI001.0127.087	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 87MM		

TI001.0127.088	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 88MM		
TI001.0127.089	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 89MM		
TI001.0127.090	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 90MM		
TI001.0127.091	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 91MM		
TI001.0127.092	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 92MM		
TI001.0127.093	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 93MM		
TI001.0127.094	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 94MM		
TI001.0127.095	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 95MM		
TI001.0127.096	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 96MM		
TI001.0127.097	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 97MM		
TI001.0127.098	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 98MM		
TI001.0127.099	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 99MM		
TI001.0127.100	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 100MM		
TI001.0127.101	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 101MM		
TI001.0127.102	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 102MM		
TI001.0127.103	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 103MM		
TI001.0127.104	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 104MM		
TI001.0127.105	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 105MM		
TI001.0127.106	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 106MM		
TI001.0127.107	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 107MM		
TI001.0127.108	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 108MM		
TI001.0127.109	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 109MM		
TI001.0127.110	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 110MM		
TI001.0127.111	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 111MM		
TI001.0127.112	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 112MM		
TI001.0127.113	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 113MM		
TI001.0127.114	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 114MM		
TI001.0127.115	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 115MM		
TI001.0127.116	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 116MM		
TI001.0127.117	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 117MM		
TI001.0127.118	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 118MM		
TI001.0127.119	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 119MM		
TI001.0127.120	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 120MM		
TI001.0127.121	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 121MM		
TI001.0127.122	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 122MM		
TI001.0127.123	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 123MM		
TI001.0127.124	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 124MM		
TI001.0127.125	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 125MM		
TI001.0127.126	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 126MM		

TI001.0127.127	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 127MM		
TI001.0127.128	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 128MM		
TI001.0127.129	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 129MM		
TI001.0127.130	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 130MM		
TI002.0127.008	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 8MM	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	
TI002.0127.009	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 9MM		
TI002.0127.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 10MM		
TI002.0127.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 11MM		
TI002.0127.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 12MM		
TI002.0127.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 13MM		
TI002.0127.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 14MM		
TI002.0127.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 15MM		
TI002.0127.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 16MM		
TI002.0127.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 17MM		
TI002.0127.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 18MM		
TI002.0127.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 19MM		
TI002.0127.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 20MM		
TI002.0127.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 21MM		
TI002.0127.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 22MM		
TI002.0127.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 23MM		
TI002.0127.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 24MM		
TI002.0127.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 25MM		
TI002.0127.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 26MM		
TI002.0127.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 27MM		
TI002.0127.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 28MM		
TI002.0127.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 29MM		
TI002.0127.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 30MM		
TI002.0127.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 31MM		
TI002.0127.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 32MM		
TI002.0127.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 33MM		
TI002.0127.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 34MM		
TI002.0127.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 35MM		
TI002.0127.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 36MM		
TI002.0127.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 37MM		
TI002.0127.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 38MM		
TI002.0127.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 39MM		
TI002.0127.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 40MM		
TI002.0127.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 41MM		

TI002.0127.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 42MM		
TI002.0127.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 43MM		
TI002.0127.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 44MM		
TI002.0127.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 45MM		
TI002.0127.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 46MM		
TI002.0127.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 47MM		
TI002.0127.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 48MM		
TI002.0127.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 49MM		
TI002.0127.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 50MM		
TI002.0127.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 51MM		
TI002.0127.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 52MM		
TI002.0127.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 53MM		
TI002.0127.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 54MM		
TI002.0127.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 55MM		
TI002.0127.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 56MM		
TI002.0127.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 57MM		
TI002.0127.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 58MM		
TI002.0127.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 59MM		
TI002.0127.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 60MM		
TI002.0127.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 61MM		
TI002.0127.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 62MM		
TI002.0127.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 63MM		
TI002.0127.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 64MM		
TI002.0127.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 65MM		
TI002.0127.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 66MM		
TI002.0127.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 67MM		
TI002.0127.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 68MM		
TI002.0127.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 69MM		
TI002.0127.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 70MM		
TI002.0127.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 71MM		
TI002.0127.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 72MM		
TI002.0127.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 73MM		
TI002.0127.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 74MM		
TI002.0127.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 75MM		
TI002.0127.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 76MM		
TI002.0127.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 77MM		
TI002.0127.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 78MM		
TI002.0127.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 79MM		
TI002.0127.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 80MM		

TI002.0127.081	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 81MM		
TI002.0127.082	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 82MM		
TI002.0127.083	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 83MM		
TI002.0127.084	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 84MM		
TI002.0127.085	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 85MM		
TI002.0127.086	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 86MM		
TI002.0127.087	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 87MM		
TI002.0127.088	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 88MM		
TI002.0127.089	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 89MM		
TI002.0127.090	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 90MM		
TI002.0127.091	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 91MM		
TI002.0127.092	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 92MM		
TI002.0127.093	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 93MM		
TI002.0127.094	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 94MM		
TI002.0127.095	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 95MM		
TI002.0127.096	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 96MM		
TI002.0127.097	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 97MM		
TI002.0127.098	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 98MM		
TI002.0127.099	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 99MM		
TI002.0127.100	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 100MM		
TI002.0127.101	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 101MM		
TI002.0127.102	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 102MM		
TI002.0127.103	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 103MM		
TI002.0127.104	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 104MM		
TI002.0127.105	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 105MM		
TI002.0127.106	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 106MM		
TI002.0127.107	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 107MM		
TI002.0127.108	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 108MM		
TI002.0127.109	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 109MM		
TI002.0127.110	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 110MM		
TI002.0127.111	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 111MM		
TI002.0127.112	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 112MM		
TI002.0127.113	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 113MM		
TI002.0127.114	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 114MM		
TI002.0127.115	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 115MM		
TI002.0127.116	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 116MM		
TI002.0127.117	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 117MM		
TI002.0127.118	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 118MM		
TI002.0127.119	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 119MM		

TI002.0127.120	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 120MM		
TI002.0127.121	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 121MM		
TI002.0127.122	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 122MM		
TI002.0127.123	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 123MM		
TI002.0127.124	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 124MM		
TI002.0127.125	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 125MM		
TI002.0127.126	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 126MM		
TI002.0127.127	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 127MM		
TI002.0127.128	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 128MM		
TI002.0127.129	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 129MM		
TI002.0127.130	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø2,7 X 130MM		


IMPORTANTE

Para o uso do **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** é necessário o uso de instrumentais específicos.

O Kit de Instrumental para o **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** está registrado na Anvisa sob o nº XXXXXXXXXXXX, não fazendo parte deste processo de registro e não sendo parte integrante do produto.

ACESSÓRIOS E COMPONENTES ANCILARES

O **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** possui como acessórios:

Código	Descrição	Matéria Prima	Dimensões	Ilustração
TI019.9000.001	Retrator para Placas de Clavícula Superior	Titânio Puro - ASTM F 67	2,3 x 7,8 x 5,9 mm	

COMPOSIÇÃO

O **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** são manufaturadas em titânio puro conforme as especificações da norma ASTM F67 e titânio liga conforme a norma ASTM F136 conforme especificado nas tabelas 1 e 2. O titânio possui uma combinação de alta resistência mecânica, elevada resistência à corrosão eletroquímica e resposta biológica favorável, que fazem com que ele seja o metal mais utilizado como biomaterial. O titânio é um metal especial dentre os metais leves como alumínio e magnésio por sua elevada razão resistência/peso. Uma contribuição para a biocompatibilidade do titânio é a grande resistência à corrosão que é conferida por seu óxido, que forma uma película contínua e aderente. Uma outra contribuição é a sua alta constante dielétrica quando comparada com a de outros óxidos. O TiO_2 promove forças de Van der Waals maiores do que as de outros óxidos, apresentando, portanto, propriedades catalíticas em diversas reações químicas. Os implantes em titânio têm cerca de 45% menos densidade do que aqueles que contêm ferro e cobalto em suas composições, um importante fator relacionado ao conforto do paciente, principalmente em fraturas de ossos longos. O seu baixo módulo de elasticidade é outra vantagem, pois minimiza a proteção contra pressão, e isso é transferido ao osso. Essa importância relativa contra a pressão é aumentada à medida que o tamanho do implante aumenta. O titânio é extremamente insolúvel e atua como um material inerte que não interage com o organismo. Independente das ligas citadas é preciso que as combinações sejam de implantes da mesma marca, pois os mesmos foram projetados para tais combinações observando acabamento superficial e tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos que podem interferir nas combinações. Por isso implantes metálicos de diferentes fabricantes não são recomendados por motivos de incompatibilidade química, física, biológica e funcional.

COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

A compatibilidade dimensional do sistema está descrito na **tabela 1** deste documento.

INDICAÇÕES DE USO

O Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport tem como indicação a fixação em ossos fraturados com o objetivo de proporcionar fixação de fraturas do membro superior e inferior ou ainda artrodese de punho, quando a função da mão é comprometida devido a dores, deformidades e instabilidades e fraturas no pé. Especificamente, cada placa possui a seguinte indicação:

Tabela 3: Indicação de uso das Placas que compõe o Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA-PRIMA	INDICAÇÃO DE USO
TI019.51XX.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO LP 12MM XX F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	FRATURAS DE CLAVÍCULA
TI019.3000.006	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR DISTAL BLOQUEADA AV XX F		
TI019.4000.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV XX F		
TI019.6100.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL LP XX F		
TI019.7100.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD LP XX F		
TI019.8100.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV LP XX F		
TI019.9000.001	RETRATOR PARA PLACAS DE CLAVÍCULA SUPERIOR		
TI019.50XX.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM XX F	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	FRATURAS DE CLAVÍCULA
TI019.50XX.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM XX F		
TI019.50XX.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM XX F		
TI019.50XX.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR BLOQUEADA AV GANCHO 12MM XX F		
TI019.6000.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR LATERAL XX F		
TI019.7000.XXX	PLACA DE CLAVÍCULA SUPERIOR MEDIAL BLOQUEADA AV STANDARD XXF	TITÂNIO PURO - ASTM F 67	FRATURAS DE CLAVÍCULA
TI020.1073.XXX	PLACA DE OLECRANO PROXIMAL BLOQUEADA AV XX F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	FRATURAS DE OLECRANO
TI020.2070.XXX	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV XX F		
TI020.2090.XXX	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV XX F		
TI020.21XX.XXX	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV XX F		
TI020.31XX.XXX	PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA AV EXTRA-ARTICULAR XX F		
TI020.51XX.XXX	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	FRATURAS DE ÚMERO DISTAL
TI020.60XX.XXX	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV DORSOLATERAL COM SUPORTE XX F		

TI020.70XX.XXX	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA LATERAL XX F		
TI020.81XX.XXX	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL		
TI020.90XX.XXX	PLACA ÚMERO DISTAL BLOQUEADA AV COLUNA MEDIAL COM EXTENSÃO XX F		
TI019.10XX.XXX	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV D XX F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	FRATURAS DE ÚMERO PROXIMAL
TI019.21XX.XXX	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV XX F		
TI019.2XXX.0XX	PLACA DE ÚMERO PROXIMAL BLOQUEADA AV - X FUIROS		
TI020.430X.10X	PLACA BLOQUEADA AV RADIO PROXIMAL P/S 3/5 F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	FRATURA DA CABEÇA DO RÁDIO
TI010.3105.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° P 10F	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	ARTRODESE DE PUNHO
TI010.3110.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° M 10F		
TI010.3205.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° P 10F		
TI010.3210.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° M 10F		
TI010.3305.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° P 10F		
TI010.3310.010	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° M 10F		
TI010.3110.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° M 10F D		
TI010.3205.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° P 10F D		
TI010.3210.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° M 10F D		
TI010.3305.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° P 10F D		
TI010.3310.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° M 10F D		
TI010.3105.110	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° P 10F D		
TI010.4105.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 5° P 11F		
TI010.4110.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 5° M 11F		
TI010.4205.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 10° P 11F		
TI010.4210.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 10° M 11F		
TI010.4305.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 15° P 11F		
TI010.4310.011	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV MB 15° M 11F		
TI010.3105.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° P 10F E		
TI010.3110.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 5° M 10F E		
TI010.3205.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° P 10F E		
TI010.3210.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 10° M 10F E		
TI010.3305.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° P 10F E		
TI010.3310.210	PLACA FUSÃO PARA PUNHO BLOQUEADA AV SB 15° M 10F E		
TI020.4420.XXX	PLACA DE RADIO PROXIMAL VERSATIUM D20 XXF	TITÂNIO LIGA - ASTM	FRATURA DA CABEÇA DO

TI020.4422.XXX	PLACA DE RADIO PROXIMAL VERSATIUM D22 XXF	F 136	RÁDIO
TI020.4424.XXX	PLACA DE RADIO PROXIMAL VERSATIUM D24 XXF		
TI020.4426.XXX	PLACA DE RADIO PROXIMAL VERSATIUM D26 XXF		
TI020.4520.XXX	PLACA DE RADIO PROXIMAL VERSATIUM ANGULADA D20 XXF		
TI020.4522.XXX	PLACA DE RADIO PROXIMAL VERSATIUM ANGULADA D22 XXF		
TI020.4524.XXX	PLACA DE RADIO PROXIMAL VERSATIUM ANGULADA D24 XXF		
TI020.4526.XXX	PLACA DE RADIO PROXIMAL VERSATIUM ANGULADA D26 XXF		
TI003.0001.1XX	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSAO PRIMEIRO MTP X GRAUS C - 05 FUROS D	TITÂNIO LIGA - ASTM F 136	FRATURAS NO PÉ
TI003.0001.2XX	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS C - 05 FUROS E		
TI003.0002.1XX	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 05 FUROS D		
TI003.0002.2XX	PLACA EVOLVE-FOOT ESTREITA PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 05 FUROS E		
TI003.0003.1XX	PLACA EVOLVE-FOOT STD PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 05 FUROS D		
TI003.0003.2XX	PLACA EVOLVE-FOOT STD PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 05 FUROS E		
TI003.0004.1X6	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 06 FUROS D		
TI003.0004.2X6	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 06 FUROS E		
TI003.0004.1X7	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 07 FUROS D		
TI003.0004.2X7	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 07 FUROS E		
TI003.0004.1X8	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 08 FUROS D		
TI003.0004.2X8	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 08 FUROS E		
TI003.0010.1X4	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO XX - 04 FUROS D		
TI003.0010.2X4	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO XX - 04 FUROS E		
TI003.0011.1X5	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO XX C - 05 FUROS D		
TI003.0011.2X5	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PASSO XX C - 05 FUROS E		
TI003.0013.XX5	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS PLANTAR - 05 FUROS D/E		
TI003.0020.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT LISFRANC		
TI003.0032.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT I - 02 FUROS 20MM		
TI003.0033.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT L - 05 FUROS D/E		
TI003.0034.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT T - 05 FUROS XX		
TI003.0035.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT QUINTO METATARSO COM GANCHO D/E		
TI003.0051.00X	PLACA EVOLVE-FOOT ARTRODESE TALO-NAVICULAR C - X		
TI003.0105.00X	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO XXMM		
TI003.0031.00X	PLACA EVOLVE-FOOT H - 04 FUROS XX		
TI003.0005.X08	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP R - 08 FUROS D/E		

TI003.0005.X10	PLACA EVOLVE-FOOT PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP R - 10 FUIROS D/E		
TI003.0000.1X4	PLACA EVOLVE-FOOT MINI PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 04 FUIROS D		
TI003.0000.2X4	PLACA EVOLVE-FOOT MINI PARA FUSÃO PRIMEIRO MTP X GRAUS - 04 FUIROS E		
TI003.0012.X06	PLACA EVOLVE-FOOT LAPIDUS MEDIO-PLANTAR - 06 FUIROS D/E		
TI003.0040.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT REDE CURVA - XX FUIROS		
TI003.0041.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT REDE - XX FUIROS		
TI003.0042.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT OBLÍQUA D/E		
TI003.0050.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT ARTRODESE TALO-NAVICULAR X		
TI003.0052.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT TALAR XXMM		
TI003.0060.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT OSTEOTOMIA DE ABERTURA PASSO XXMM		
TI003.0100.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA P - D		
TI003.0101.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO TELA COM SUPORTE X - D		
TI003.0102.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR X - D		
TI003.0029.0XX	PLACA EVOLVE-FOOT ESPECIAL M3 – 05 FUIROS P		
TI003.0030.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT – 0X FUIROS X		
TI003.0102.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR X - E		
TI003.0103.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR COM SUPORTE X - D		
TI003.0104.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT PARA CALCÂNEO SUPERIOR T COM SUPORTE X - D		
TI003.0212.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 12 X XXMM		
TI003.0215.XXX	PLACA EVOLVE-FOOT PARA OSTEOTOMIA DE CALCANEIO 15 X XXMM		
TI003.1000.002	PLACA BLOQUEADA AV MEDIA PARA FIXAÇÃO/FUSÃO DO PRIMEIRO METATARSO/FALANGE		

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim com seu armazenamento e transporte.

INSTRUÇÕES DE USO

- Atenção: implante fornecido **NÃO - ESTÉRIL – ESTERILIZAR** de acordo com as instruções recomendadas nessa instrução.
- As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.
- Manipular o **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** exclusivamente em ambientes adequados, com os devidos cuidados e somente por profissionais capacitados.

- O **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** deverá ser implantado de acordo com as exigências das técnicas cirúrgicas.

CONTRA INDICAÇÕES

As contra-indicações incluem, mas não estão limitadas à:

- Gravidez, a menos que uma fixação interna seja indicada para tratamento de uma fratura instável.
- Doenças mentais profundas ou pacientes não obedeçam às instruções pós-operatórias.
- Infecção localizada na zona operatória ou infecção sistêmica que possa comprometer o sucesso do procedimento.
- Todos os pacientes que tenham uma cobertura tissular pobre na zona operada.
- Febre.
- Fenômenos Inflamatórios locais importantes.
- Alergia ou intolerância suspeita ou conhecida aos metais que compõem o sistema.
- Todas as outras condições médicas ou cirúrgicas que comprometam o processo de uma cirurgia de implante (presença de tumores malignos, metástase ou presença de anomalias congênitas graves).

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

**PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS EXPLANTADO. NÃO REUTILIZAR O PRODUTO.
PROIBIDO REPROCESSAR**

Os modelos que compõem o **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** não são indicados para uso isoladamente.

Nenhum implante pode resistir a um nível de atividade ou peso de um osso normal saudável se não for suportado por uma união óssea sólida. Se a cicatrização é demorada ou não ocorre, o implante pode eventualmente curvar e/ou quebrar devido a fadiga do material.

O respeito aos procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios, o entendimento adequado da técnica cirúrgica, a seleção correta e posicionamento do implante são críticos para o sucesso da cirurgia.

A seleção correta do paciente e o seu acompanhamento são fatores que influenciam os resultados em particular: Fumo, obesidade (patológica ou não), alcoolismo, baixa qualidade do osso, deficiência muscular e/ou paralisia, tem sido fatores para aumentar significativamente a incidência da não união. Esta situação e as possíveis conseqüências devem ser explicadas a estes pacientes. A correta seleção do implante é extremamente importante. O tipo apropriado, forma e tamanho devem ser de acordo com o paciente. Estes dados são obtidos a partir do planejamento pré-operatório, visto que o tamanho e formato dos ossos humanos também colocam limitações no tamanho e resistência dos implantes. Todos os implantes metálicos são sujeitos a repetir o stress durante o uso, por isso o critério apropriado para seleção do paciente deve ser seguido; o posicionamento correto do implante e os cuidados apropriados no pós-operatório são essenciais para minimizar o stress do peso do implante.

- Cuidados devem ser tomados para evitar a colocação de um peso excessivo no implante, uma vez que isto pode aumentar os riscos de encurvamento, rachaduras e/ou fraturas do implante devido à fadiga do metal que eventualmente levará ao afrouxamento antes da união ser atingida. Isto por sua vez pode causar danos ou necessidade de uma remoção prematura do implante.
- **PRODUTO NÃO ESTÉRIL**
- Condições especiais de armazenamento: Conservar em local arejado, seco e ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada

Observação: Não devem ser utilizados componentes de implantes de fabricantes diferentes, **portanto recomendamos que os produtos tenham a mesma procedência.**

Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE ROTULO.

PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Recomendações de utilização gerais

- Todos os implantes devem ser utilizados com o formato original, exceto se o contrário for especificamente mencionado.
- Os implantes devem ser manipulados com cuidado, pois a ocorrência de riscos é suscetível de provocar micro trincas alterando a resistência mecânica e à corrosão.
- O planejamento pré-operatório permitem determinar a dimensão correta dos implantes.
- Apenas a utilização de material de instrumentação específico para este implante garante a sua colocação de forma satisfatória.
- Caso seja necessária uma explantação, as condições de descontaminação e esterilização do instrumental deverão ser respeitadas.
- Os detritos resultantes da intervenção (embalagens, explantes...) deverão ser tratados como quaisquer outros detritos de origem médica pelo estabelecimento de cuidados da saúde.

Recomendações de utilização relacionadas com a técnica

- Os procedimentos cirúrgicos para preparação do leito ósseo devem ser adaptados às dimensões e às qualidades mecânicas do osso.

Efeitos secundários indesejáveis relacionados com a técnica de colocação

- Fraturas ósseas e falsos trajetos,
- Dores,
- Infecção no local da cirurgia,
- Hematomas,
- Lesões vasculares nervosas.

Efeitos secundários indesejáveis relacionados com a utilização do implante

- Infecção
- Deslocamento que pode provocar uma migração,
- Reações ósseas ao contato com o implante.

Planificação e precauções PRÉ-OPERATÓRIAS

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- Alguns problemas podem surgir enquanto implantes e instrumentos são manuseados. Cheque cuidadosamente a integridade do implante: a superfície dos componentes não deve estar manchada, arranhada ou defeituosa.
- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção **"INDICAÇÕES"**.
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção **"CONTRA INDICAÇÕES"**, devem ser evitados;
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

Precauções OPERATÓRIAS

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- Alguns problemas podem surgir enquanto implantes e instrumentos são manuseados. Cheque cuidadosamente a integridade do implante: a superfície dos componentes não deve estar manchada, arranhada ou defeituosa.

Informações que devem ser dadas aos pacientes pelo cirurgião no PÓS-OPERATÓRIO

- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção acima "INDICAÇÕES"
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção "CONTRA-INDICAÇÕES" acima, devem ser evitados;
- O cirurgião deve aconselhar os pacientes portadores de um implante a observarem certas regras de condução de uma vida saudável, e a salvaguardarem-se de quaisquer esforços abusivos. Os fatores susceptíveis de comprometerem o sucesso da implantação são:
 - Ausência de prevenção das infecções locais e genéricas,
 - Toxicomania e/ou tendência para o abuso de drogas e medicamentos,
 - Atividades físicas intensas ou movimentos repetitivos que exponham a prótese a cargas excessivas (trabalho físico penoso, etc).
 - Incapacidade intelectual do paciente para compreender e cumprir as instruções do médico,

- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

Orientações pós-operatórias e advertências aos pacientes pelos médicos e a colaboração do paciente para seguir as instruções são extremamente importantes:

- O paciente deve ser instruído sobre as suas limitações e ser orientado para dirigir suas atividades de acordo.
- O paciente deve estar ciente que o excesso de peso durante o período de reabilitação pós-operatória pode resultar em encurvamento, afrouxamento ou fratura.
- Uma ausência de consolidação óssea persistente resultará em uma carga excessiva que repetidamente se aplicará ao implante, eventualmente conduzindo ao encurvamento, afrouxamento ou até mesmo fratura do dispositivo. No caso de uma ausência de consolidação persistente, ou se os componentes começarem a afrouxar, encurvar, e/ou quebrarem, o dispositivo deve ser revisado e/ou removido sem demora, antes que sérios danos ocorram.
- Todo material de síntese, seja ele uma placa, parafuso ou mesmo fios e hastes são implantados para dar uma fixação temporária na fratura. A finalidade dos implantes é manter a fratura estável por um período de tempo em que a consolidação óssea se forma.
- Esta consolidação óssea demora em média de 3 a 6 meses dependendo da fratura, do local e do membro fraturado. Portanto, é fundamental que o paciente siga as orientações do médico tomando os devidos cuidados com a carga suportada na região durante os primeiros meses. Os médicos também devem acompanhar a região fraturada através de RX e exames clínicos para avaliar a formação de calo ósseo. Caso esse não tenha se formado durante o período de 6 a 7 meses, o médico deve intervir na região, colocando outro implante ou mesmo enxerto ósseo, porque nenhum material de implante suporta muito tempo micro movimentos. Se o médico não proceder dessa forma, pode ocorrer uma quebra por fadiga do implante.

Cirurgias de Revisão e Remoção

O paciente deve ser informado sobre a necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura dos componentes.

Os instrumentais cirúrgicos (ou ferramentas) necessários para a implantação ou remoção dos modelos de placas e parafusos estão identificados por nome e código. E devem ser, necessariamente, da marca TECHIMPORT, de modo a evitar possíveis incompatibilidades dimensionais de projeto.

LIMITES DE MOLDAGEM DO IMPLANTE.

Destacamos que é de extrema importância o manuseio correto dos implantes.

Durante o manuseio dos implantes deve ser evitados arranhões ou entalhes nos implantes, moldagem inversa pois esses defeitos são concentradores de tensão e podem ser sítios de nucleação de trincas e diminuir a resistência à corrosão, podendo resultar em fratura do implante ou fadiga.

Carga Suportada

Os implantes utilizados em cirurgia servem como tutor e ajudam a promover um processo normal de consolidação. Esses não têm função de substituir estruturas ósseas ou de sustentar indefinidamente as tensões provocadas nas regiões com fraturas não consolidadas.

Dessa forma, o cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte físico adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

Características do Suporte Ósseo Adequado para Implantação

As características do suporte ósseo adequado estão relacionadas à experiência do profissional que ao optar pela utilização do Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport deverá realizar a análise clínica do paciente, observando as restrições impostas no item Contra Indicações constante nestas Instruções de Uso.

INSTRUÇÃO DE USO

- Atenção: implante fornecido **NÃO - ESTÉRIL – ESTERILIZAR** de acordo com as instruções recomendadas nessa instrução.
- As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.
- Manipular o Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport exclusivamente em ambientes adequados, com os devidos cuidados e somente por profissionais capacitados.
- O Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport deverá ser implantado de acordo com as exigências das técnicas cirúrgicas.

Condições que podem comprometer o sucesso da cirurgia

- Osteoporose severa
- Deformidade severa
- Tumor ósseo local
- Doenças sistêmicas ou distúrbios metabólicos
- História de doenças infecciosas
- Dependência e / ou abuso à drogas
- Obesidade
- Atividade física excessiva ou atividades durante as quais o implante é repetidamente submetido a um stress excessivo (p.e.: trabalho manual pesado; corridas de maratona, etc.)
- Risco potencial de incompatibilidade com outro dispositivo implantado
- Condições mentais que impeçam o paciente de seguir as instruções.
- Alergias e outras reações ao material do implante devem ser consideradas testadas (se apropriado) e controlados durante o pré-operatório.

EFEITOS ADVERSOS

Afrouxamento mecânico pode ser o resultado de fixação defeituosa, reconstrução instável do osso fraturado ou infecção oculta. Reações de sensibilidade ao metal em pacientes raramente foram informadas.

Implantação de material estranho em tecidos resulta em reações histológicas que envolvem vários tamanhos de macrófagos e fibroblastos. A importância química deste efeito é incerta, como também mudanças semelhantes podem ocorrer como um precursor, ou durante o processo curativo.

CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

Durante o manuseio do dispositivo, sempre existe o risco de que materiais estranhos e particulados, incluindo talco de luvas, fiapos de materiais e outros contaminantes da superfície, possam entrar em contato com o dispositivo. Todos os esforços devem ser feitos para limitar o manuseio dos implantes. Um implante nunca deverá ser reutilizado, e os dispositivos explantados não devem ser implantados novamente. O estresse pode levar ao desenvolvimento de imperfeições microscópicas, e, mesmo que o implante pareça intacto, pode ocasionar a falência do mesmo. Se o paciente estiver envolvido em alguma atividade ou ocupação que possa causar estresse no implante (caminhadas substanciais, corrida, levantamento de peso ou tensão muscular), estas forças podem causar falhas no dispositivo. A durabilidade desses dispositivos é afetada por numerosos fatores biológicos, biomecânicos e extrínsecos, que limitam a sua vida útil. Isto posto, a obediência estrita às indicações, contra-indicações e precauções para este produto são essenciais para maximizar a sua vida útil.

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS AO PACIENTE

O cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte físico adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante. Diante de uma fratura perfeitamente estabilizada, a carga pode ser liberada. Se a fratura não estiver estabilizada nenhuma carga pode ser dada ao sistema implantado.

ESTERILIZAÇÃO

Todos os modelos do **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** são comercializadas não estéreis, portanto a instituição que realizará a cirurgia será responsável pela sua esterilização, devendo utilizar métodos regularmente validados.

O produto é fornecido em sua embalagem original previamente limpo. Antes do uso, a embalagem deve ser inspecionada a fim de verificar se não há rupturas ou danos. O produto só deve ser desembalhado antes da esterilização com o intuito de preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração, manuseando-o o mínimo possível.

Métodos recomendados para esterilização desse produto

Vapor em Autoclave: Este produto é fornecido não estéril. Antes da utilização deve ser esterilizado. Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital (*ISO 17665-1: 2006 Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*). A autoclave é equipamento para esterilização através de vapor saturado sob pressão. É recomendável que sejam aplicados os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado):

Tabela 4 – Parâmetros de esterilização física em autoclaves

Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Convencional (1 atm de pressão)	121°C (250°F)	30 minutos
Convencional (1 atm de pressão)	132°C (270°F)	15 minutos
Gravidade	132°C (270°F)	45 minutos
Alto Vácuo	132°C (270°F)	7 minutos

Obs.: O tempo deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

PARA MELHOR ESCLARECIMENTO CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES QUE ACOMPANHA CADA AUTOCLAVE.

NOTA

Ficam sob responsabilidade da instituição hospitalar, o método de esterilização, os equipamentos, os controles, e as instruções de esterilização utilizada.

Cuidados com os artigos Esterilizados.

Condições de estocagem dos artigos esterilizados:

- Quanto ao ambiente: deve ser limpo; arejado; seco; deve ser restrito à equipe do setor.
- Quanto ao artigo: após o processo de esterilização, não colocá-lo em superfície fria (pedra ou aço inoxidável), utilizar cestos ou recipientes vazados até que esfriem;
- invólucro (tecido de algodão cru, tecido não tecido, papel grau cirúrgico, papel crepado, papel com filme, tyvec ou caixas metálicas perfuradas) deve permanecer íntegro e ser pouco manuseado para evitar que os pacotes rasguem ou solte o lacre;
- ser estocado em armários fechados com prateleiras;
- prateleiras identificadas de modo a facilitar a retirada do material;
- material deve ser estocado de acordo com a data de vencimento da esterilização para facilitar a distribuição e não ficar material vencido no estoque;
- estocar separadamente dos não estéreis para reduzir o nível de contaminantes externos.

CUIDADOS COM O MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO

Embalagem:

- O **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** são fornecidas não estéreis e são embaladas individualmente em sacos de polietileno (PEBD) transparente fechados por termosselagem.
O PEBD tem uma combinação única de propriedades: tenacidade, alta resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade, estabilidade e propriedades elétricas notáveis. O PEBD pode ser processado por extrusão, moldagem por sopro e moldagem por injeção. Assim sendo, é aplicado como filmes para embalagens industriais e agrícolas, filmes destinados a embalagens de alimentos líquidos e sólidos, filmes laminados e plastificados para alimentos, embalagens para produtos farmacêuticos e hospitalares, brinquedos e utilidades domésticas, revestimento de fios e cabos, tubos e mangueiras (OPP (2000)).
- Os implantes embalados só devem ser aceitos se recebidos com a embalagem de fábrica e os rótulos intactos.
- O rótulo e a embalagem devem ser totalmente removidos antes dos componentes serem autoclavados a vapor.

Armazenagem e transporte:

- Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 35°C) e umidade relativa de 30% e ao abrigo da luz solar direta.
- Os implantes devem ser armazenados na embalagem original, em local fresco e seco e protegidos da poeira e da luz solar direta.
- Proteger os implantes de arranhões e amassamentos
- Tenha extremo cuidado no manuseio e armazenagem dos implantes.
- Não permita o contato com metal e outros objetos que possam comprometer o uso apropriado final.
- Implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a armazenagem de ambientes corrosivos tais como: ar salgado, umidade etc.

Precauções quanto ao manuseio:

- Uma vez removido do paciente, o implante não deve ser reusado. Descarte todos os implantes danificados. A TECHIMPORT não aceita devolução deste tipo de material.
- O implante deve ser usado somente em suas condições originais. Qualquer mudança feita pelo usuário pode levar à falha do implante.
- Tenha extremo cuidado ao manusear os implantes. Riscos na superfície dos componentes podem causar rachaduras que podem significativamente reduzir as características de uso do implante e particularmente resistência à corrosão.
- No caso de ocorrer algum dano no implante antes de ser utilizado (seja por quedas ou riscos), este deve ser devolvido a TECHIMPORT, que estabeleceu um procedimento específico para o recebimento de devolução deste material.
- É essencial para a durabilidade do implante que as superfícies dos ossos estejam perfeitamente limpas e não estejam danificadas.
- Advertimos para que não sejam utilizados implantes de outras marcas com os implantes TECHIMPORT.
- Siga as regras específicas de compatibilidade dos componentes definidas na literatura e técnicas cirúrgicas.
- O planejamento pré-operatório usando radiografias permite a determinação dos tamanhos dos componentes.

Manuseio de implantes não utilizados e fora da embalagem original:

O **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** são fornecidos em sua embalagem original previamente limpo e pronto para a esterilização. A embalagem do produto não é própria para esterilização, no entanto o produto é fornecido pronto para ser esterilizado. Os mesmos durante a esterilização devem ser manuseados de tal forma que não comprometam sua rastreabilidade. As etiquetas de rastreabilidade devem seguir o produto em todas as fases cirúrgicas. Os envelopes plásticos de PEBD protegem e conservam os implantes até seu uso. O produto só deve ser desembulhado imediatamente antes da esterilização com o intuito de preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração, manuseando-o o mínimo possível, assim recomendado na norma NBR ISO 8828. Caso o produto não tenha sido utilizado durante a cirurgia e estando fora de sua embalagem o mesmo deve ser descartado, considerado impróprio para uso. O reprocessamento deste produto é proibido conforme legislação brasileira. Ver item “**DESCARTE DO DISPOSITIVO**”.

Formas de apresentação do produto médico

O implante é embalado unitariamente em embalagens plásticas transparente fabricadas em polietileno (figura 01). Em todas as embalagens são inseridas as instruções de uso do produto. Cada placa e parafuso são embalados individualmente e rotulados. Junto com cada implante são fornecidas 2 rótulos internos que é a etiqueta de rastreabilidade. O modelo do rotulo bem como as informações contidas nelas estão definidas na figura 02.



Figura 01 – Modelo da embalagem utilizada na embalagem das placas e parafusos

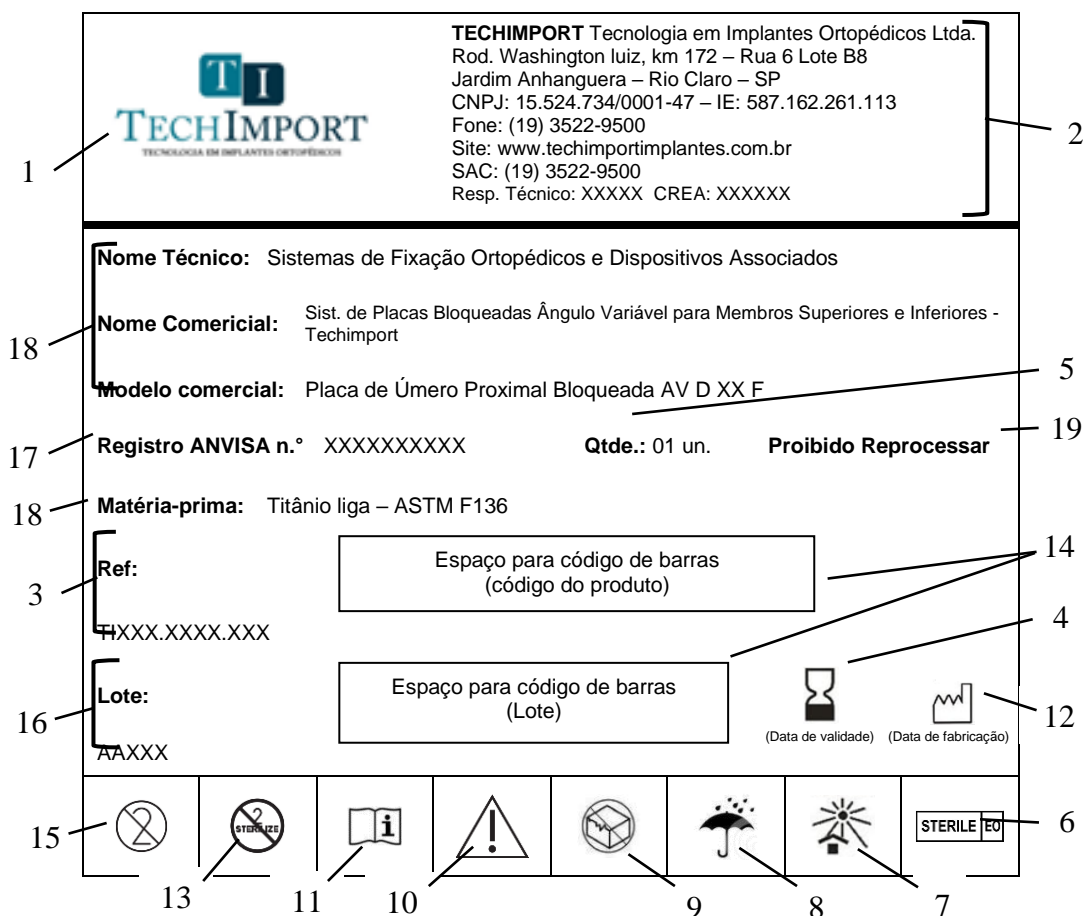


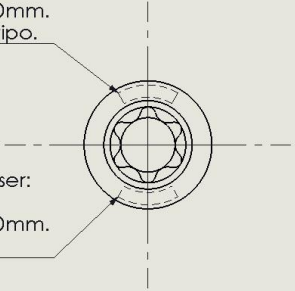
Figura 02 – Modelo de rotulo (etiqueta de rastreabilidade)

Descrição dos campos do rótulo:

- 01: Logotipo da empresa;
- 02: Dados do fabricante;
- 03: Código;
- 04: Válido até;
- 05: Quantidade;
- 06: Limites de temperatura
- 07: Manter ao abrigo do sol;
- 08: Manter seco;
- 09: Frágil, manusear com cuidado;
- 10: Produto de uso único;
- 11: Não estéril;
- 12: Data de fabricação;
- 13: Não utilizar se a embalagem estiver danificada;
- 14: Área (retângulo tracejado) destinada ao código de barras e RFID;
- 15: Consultar instruções de operação;
- 16: Código de lote;
- 17: Número do registro na ANVISA;
- 18: Descrição do produto (nome técnico, nome comercial, modelo comercial e matéria-prima)
- 19: Proibido reprocessar

RASTREABILIDADE: Para garantir a rastreabilidade do produto é recomendado que o cirurgião responsável pelo implante notifique ao distribuidor informações como nome da Unidade Hospitalar, nome do cirurgião, data da cirurgia, nome do paciente que recebeu o implante, código do produto, número do lote do produto e o número do registro do produto na Anvisa. Em cada embalagem são fornecidas 2 etiquetas do Paciente.

MARCAÇÃO: A identificação do produto é feito através de gravação laser. O **Sistema de Placas Bloqueadas Ângulo Variável para Membros Superiores e Inferiores - Techimport** contém as seguintes informações gravadas a laser para permitir a rastreabilidade e acompanhamento do paciente no pós operatório:

<p>Marcação a laser: - Fonte: Arial. - Tamanho: 0,60mm. - Marcar: Logotipo.</p>  <p>Marcação a laser: - Fonte: Arial. - Tamanho: 0,60mm. - Marcar: Lote.</p>	<p><i>Logo-Lote-sigla do material-código do produto-dimensão</i> <i>“maiores detalhes ver desenho do produto”</i></p>
<p>Parafusos</p> <p>Nos parafusos a gravação é feita sobre a cabeça do parafuso. Devido a limitação de espaço, nos parafusos não são gravados o código do produto.</p>	<p>Placas</p> <p>Nas placas a gravação é feita na parte superior e entre os furos</p>

DESCARTE DO DISPOSITIVO: Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados. Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Estes dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização.

DISPOSITIVOS EXPLANTADOS SÃO CONSIDERADOS LIXO HOSPITALAR

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar este evento

adverso ao órgão sanitário competente e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA** através do e-mail gerencia@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Em casos de dúvidas o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA:

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

Fabricado por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172, RUA 06, CONDOMINIO CONPARK, CAIXA POSTAL 223

RIO CLARO-SP-BRASIL CEP: 13.501-600